

R20

Kombinationsübersicht



Hersteller / Model	Docking	Hersteller / Model	Docking
Sunrise Medical		Berollka*	
Breezy BasiX ²	B	Junior 2 AR / SLT	B
Breezy Cirrus G5	B	Little AR / SLT	B
Breezy Cirrus G5 (Sitzschalenuntergestell)	B	LUKE AR / SLT	B
Breezy Emineo	B	RACER (Rohrdurchmesser 30 mm)	B
Breezy Exigo 20	B	SLADE AR / SLT	B
Breezy RelaX ²	B	SPRINT AR / SLT	B
Breezy RubiX ²	B	TOURER / CRUISER (Rohrdurchmesser 25 mm)	B
Breezy RubiX ² Comfort	B	TRAXX / TRAXX TT (Rohrdurchmesser 23 mm)	B
Sopur Easy 160i	B	Bischoff & Bischoff	
Sopur Easy 200	A/B	BX 11	B
Sopur Easy 300	A/B	Pyro Light / Pyro Light XL	B
Sopur Easy Life	A/B	Pyro Light Optima / Pyro Light Optima XL	B
Sopur Easy Life R	A/B	Pyro Start / Pyro Start Plus	B
Sopur Easy Life RT	A/B	S-Eco 2	B
Sopur Easy Life T	A/B	S-Eco 300 / S-Eco 300 XL	B
Sopur Neon ² (hintere Sitzhöhe ab 390 mm)	B	Dietz	
Quickie / zippie IRIS	D	AS 01**	B
Zippie Youngster 3	B	Caneo Serie (inkl. XL)	B
ALU REHAB		Serena II**	B
Netti III (HD / XHD & Dynamic functions) (Sitzbreite 350 - 600 mm)	B	Tomtar BasiK / BasiK+	B
Netti 4U (CE / CE PLUS / CED / BASE)	B	Drive	
Netti Dynamic S (Sitzbreite 350, 400 mm)	B	Ecotec / Ecotec 2G	B
Netti S (Sitzbreite 350, 400 mm)	B	Fretec	B
Berollka*		Litec / Litec 2G / Litec 2G Plus	B
B2 (Rohrdurchmesser 30 mm)	B	Rotec / Rotec XL	B
BASIC	B	Etac	
F1 (Rohrdurchmesser 30 mm)	B	Crissy	B
Filou	B	Cross 5, Cross 5 XL, Cross 5 Active, Cross 6	D
FINESS	B	M 100	B
		Prio, Prio 3D	B

Bitte beachten Sie: Die obige Liste ist ein Hinweis auf Rollstuhlmodelle, an denen der R20 montiert werden kann. Baujahr, Rahmenform, Rücken Zubehör, Verbindungsstangen zwischen Seitenrahmen und Rahmenzubehör sind jedoch von Einfluss. Deshalb ist es wichtig, dass Sie es testen um 100% sicher zu sein! Bei Zweifeln wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Kombinationsübersicht zeigt nur Rollstühle mit einer unterschriebenen Kombinationsvereinbarung. Informationen zum Andocken finden Sie auf der nächsten Seite.

* Nur mit Sicherheitsrad, ohne Blenden und Zubehörbox

** Benötigen spezielles Kit für Rohrdurchmesser 29 - 32 mm (Artikelnummer 07501106)

R20

Kombinationsübersicht



Hersteller / Model	Docking	Hersteller / Model	Docking
HOGGI*		PRO ACTIV***	
BINGO-Evo	B	BUDDY (D3, D4, D7)	B
DURO, DURO CROSS	B	TRAVELER (Classicline, 4all Ergo, 4you Ergo)	B
SHERPA	A	SPEEDY (A1, A2, F4, 4all, 4you, 4all Ergo, 4teen)	B
SWINGBO-2; SWINGBO-2 XL	B	REHATEC	
SWINGBO-VTi, SWINGBO-VTi XL	A	Galileo (Grösse 1, 2, 3, 4, 5)	B
Invacare**	B	Mika (Grösse 1)	B
Action 1 / 2 / 3 / 4 / 5	B	Sunny (Grösse 2)	B
Action XT	B	SORG	
Rea Azalea family	B	Jump alpha	B
Rea Clematis	B	Jump beta BSA	B
Rea Focus	B	Jump beta Sport	B
XLT	B	Tilty Vario	B
Life & Mobility		Vector	B
Canto	B	Vector BSA	B
Roxx	B	Vassilli	
Meyra		VARIO Plus	B
Avanti / Avanti Pro	B	Vermeiren****	
Budget	B	Bobby	B
Eurochair family	B	D100, D100 (30°)	B
Format	B	D200, D200 (30°)	B
Service 3.600	B	Eclips+, Eclips+ (30°)	B
Smart F & S	B	Eclips X4, Eclips X4 (30°)	B
Solero light	B	Inovys II, Inovys II-E	B
		V200D	B
		V300D, V300D (30°), V300DL	B
		V500 (30°)	B

Bitte beachten Sie: Die obige Liste ist ein Hinweis auf Rollstuhlmodelle, an denen der R20 montiert werden kann. Baujahr, Rahmenform, Rückenzubehör, Verbindungsstangen zwischen Seitenrahmen und Rahmenezubehör sind jedoch von Einfluss. Deshalb ist es wichtig, dass Sie es testen um 100% sicher zu sein! Bei Zweifeln wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Kombinationsübersicht zeigt nur Rollstühle mit einer unterschriebenen Kombinationsvereinbarung. Informationen zum Andocken finden Sie auf der nächsten Seite.

* Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen immer HOGGI

** Nur mit Trommelbremse

*** Für die Montage der Bedieneinheit werden evtl. längere Schiebegriffe benötigt

**** Nur mit Sicherheitsrad

R20

Docking Information

Die faltbare Schiebehilfe R20 passt mühelos auf nahezu alle gängigen manuellen Rollstühle mit folgenden Abmessungen:

Box Rahmen oder ähnlicher Rahmentyp mit einem Rohrdurchmesser von 22 - 28 mm. Für Rohrdurchmesser 29 - 32 mm wird ein spezielles Kit (Artikelnummer 07501106) mitgeliefert.

Sitzbreite 320 - 600 mm

Hintere Sitzhöhe > 380 mm

Lange oder höhenverstellbare Schiebegriffe um die Bedieneinheit zu befestigen – benötigt mind. 10 mm Freiraum.




Version A mit Schrauben:
 Benötigt ein vorhandenes horizontales Loch im Rahmenrohr. Wird im Allgemeinen mit Sunrise Medical Aktivrollstühlen aus Malsch (Easy 200/300, Easy Life, Easy Life i) verwendet.

Auch für X-Family²-Rollstühle wie BasiX² und RubiX². Ersetzen Sie einfach den Kreuzstrebenclip.




Version B zum Klemmen:
 Wird am unteren Rahmenrohr festgeklemmt. Im Allgemeinen für alle Rollstühle ausser Aktivrollstühle. (Standard, z. B. für X-Family² Rollstühle).

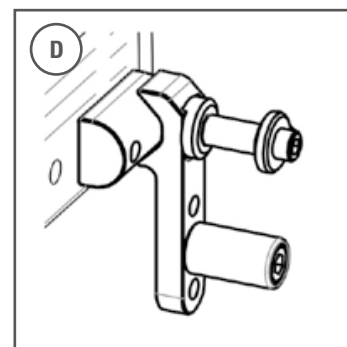


Version D zum Klemmen:
 Zu Quickie/zippie IRIS, Etac Cross 5, Cross 5 XL, Cross 5 Active, Cross 6.

Montage R20 an Breezy X-Family Rollstühle

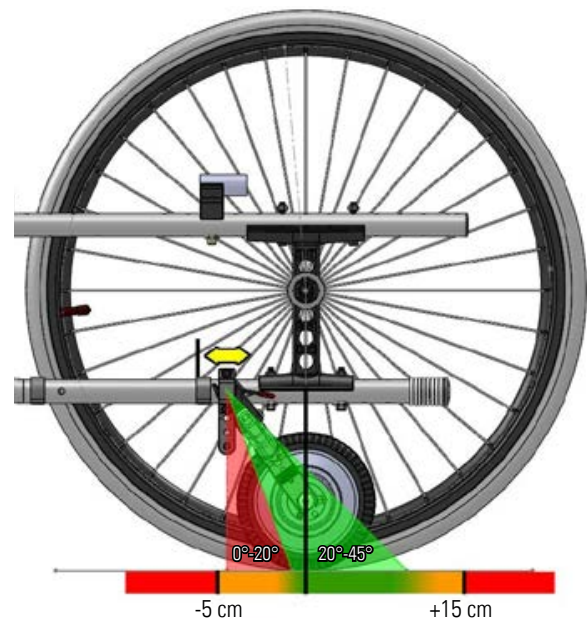

R20

Docking Arm Matrix

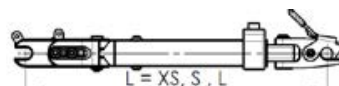

XS = 206 mm
 S = 236 mm
 L = 276 mm

			Sitzbreite (mm)																																
A: Hintere Sitzhöhe (mm) B: Abstand Unterkante Rahmen - Boden (mm)	A	B	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600				
	380	115																																	
	390	125																		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L			
	400	135							XS	XS	XS	XS					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L			
	410	145					XS	XS	XS	XS	XS	XS			S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
	420	155			XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS			S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
	430	165	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
	440	175	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
	450	185	XS	XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
	460	195	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
	470	205	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
	480	215	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
	490	225	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
	500	235	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
	510	245	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			
520	255	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L				
540	275	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L						
560	295	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L									