

improving people's lives

Präsentation

Breezy RelaxX²



Zielsetzung der Produkteinführung

- ⇒ ein leichtes und modernes Produkt innerhalb einer Produktfamilie anbieten. Ein hoher Anteil an Gleichteilen und denselben Optionen
- ⇒ ein wettbewerbsfähiges Produkt im Bereich Kosten und Nutzen einführen
- ⇒ das Produkt ist einfach zu adaptieren und optimal für den Wiedereinsatz

Der Breezy **RelaX²**

ist ein stufenlos winkelverstellbarer Komfort-Rollstuhl für den ganztägigen Gebrauch. Dieser ermöglicht dem Händler eine grosse operationelle Flexibilität (XFamily-Ansatz).



Breezy RelaxX²



24" Standard



24" mit Trommelbremse



16" mit Trommelbremse

3 Sitzbreiten = 41, 46 und 51 cm



- **Basisversion mit umfassenden Standards**
 - ⇒ Standard Komfort-Kopfstütze (höhen- und tiefeineinstellbar)
 - ⇒ Winkel- und tiefeineinstellbare Fussaule
 - ⇒ Höhenverstellbare Stosgriffe
 - ⇒ Anatomisch geformter Komfort-Sitz
 - ⇒ Anatomisch geformter Komfort-Rücken (mit seitlicher Unterstützung)
 - ⇒ Breite, lange Komfort-Armaule (längenverstellbar)
 - ⇒ Werkzeugsatz

- **Basisversion mit guten Adaptiermöglichkeiten**
 - ⇒ Sitzbreite (Seitenpolsterung)
 - ⇒ Sitztiefe
 - ⇒ Rückenhöhe
 - ⇒ Position der Armaule
 - ⇒ Sitzhöhe
 - ⇒ Neigungsbereich

Breezy Relax²



Höhenverstellbare Stossschienen

Stufenlos winkelverstellbarer Rücken

Stufenlos einstellbare Sitztiefe

Anatomisch geformter Sitz

Rückenhöhen anpassbar

Sitztiefe anpassbar

Sitzhöhe anpassbar

Werkzeugsatz
(in Rückenschale integriert)



Standard Komfort-Kopfstütze

Anatomisch geformter Rücken

Breite Komfort-Armauflage
(längenverstellbar)

Höhenanpassbare Armauflage

Innere Polsterung für Sitzbreiten-
anpassung

Höhenverstellbare Fußstützen
mit Kniepolster

Breite Komfort-Wadenauflage

Fußauflage winkel- und
tiefeinstellbar



Breezy Relax²



Sitzneigung: 0° bis 25° oder -3 bis 22°



Rückenwinkel: 0° bis 35°



- 3° Neigung (anpassbar)

25° Neigung

0° - 35° Rückenwinkel

Gasdruckfeder-Unterstützung

⇨ einfaches Transferieren in und aus dem Stuhl

⇨ bessere Druckverteilung, um Hautschädigungen vorzubeugen

⇨ komfortables langes Sitzen (Entlastungsposition)

⇨ geringerer Kraftaufwand des Betreuers nötig



Breezy RelaxX² – Neigungswinkel



Anpassbarer Sitzkantelungsbereich: 0° bis 25° oder -3° bis 22°





Anatomisch geformter Rücken mit guter seitlicher Stützung

- ⇒ langes, komfortables Sitzen
- ⇒ sicheres Sitzen für Nutzer mit reduzierter Oberkörperkontrolle (möglicherweise Seitenpelotten umgehen)

Breite Komfort-Armauflagen, längenverstellbar

- ⇒ Komfort-Sitz
- ⇒ Reduziert potenzielle Dekubitusrisiken
- ⇒ Aufschiebung hilft für die Positionierung des Therapeutischen

Anatomisch geformter Sitz (leichte Abduktion und laterale Stützung)

- ⇒ Langes, komfortables Sitzen
- ⇒ Abduktion & laterale Stützung halten Beine in optimaler Position
- ⇒ Abduktion verhindert das nach vorne Rutschen
- ⇒ Sitzmulde reduziert mögliche Dekubitusrisiken und stabilisiert das Becken

Bezugsmaterial (Dartex)

- ⇒ Einfache Reinigung und Desinfektion
- ⇒ Keine zusätzlicher Inkontinenzbezug nötig

Breezy RelaxX² - Kopfstütze



Kopfstütze höhen- und tiefeinstellbar

- ⇒ einfach auf Nutzerbedürfnisse anzupassen
- ⇒ unterstützt langes und komfortables Sitzen



Breezy RelaxX² - Rücken



Höhenverstellbare Schiebegriffe

- ⇒ einfache Einstellung auf Bedürfnisse des Betreuers (ermöglicht die nötige Betreuung)
- ⇒ einfache Handhabung (Neigung/Rückenwinkel/Stossgriffe)
- ⇒ gute Kompatibilität mit Jay Rückensystemen



Rücken höhenverstellbar (Abstufung 55 cm plus 2.5 cm / 5 cm)

- ⇒ anpassbar an Nutzerbedürfnisse
- ⇒ verbesserter Komfort dank guter Stützung
- ⇒ sehr einfach abnehmbar (kein Werkzeug, einfaches Klick-System)

Breezy RelaxX² – Sitztiefe

Sitztiefe einstellbar von 42 – 50 cm (indexiert)

- ⇒ gute Beinführung für alle Benutzer
- ⇒ langer Komfortsitz
- ⇒ einfacher Wiedereinsatz (1 Kissen für alle Tiefen)



Breezy RelaxX² - Armauflage



Breite und weiche Komfort-Armauflage

⇒ bester Komfort

Tiefeneinstellbare Armauflage

⇒ einfach anzupassen

⇒ verhindert das Entstehen einer Lücke zwischen Rücken und Armauflage beim nach hinten Kippen



Seitenpolsterung Armauflagen für

Sitzbreitenanpassung (- 4 cm)

⇒ einfach anzupassen

⇒ wiedereinsatzfähig

⇒ leicht abzunehmen

⇒ hoher Komfort



Breezy RelaxX² - Fussstützen



Manuell höhenverstellbare Fussstütze

- ⇒ Höherlegen der Beine ohne Nachjustierung
- ⇒ in der Position arretierbar
- ⇒ grosse Bedieneinheit für einfache Verstellung


Seitliche Kniepolster

- ⇒ komfortabel, reduziert Druckstellenrisiken

Höhen-, tiefenanpass-, positionierbare breite komfortable Wadenauflage

- ⇒ einfach auf die Benutzerbedürfnisse anzupassen
- ⇒ gute Sitzpositionierung durch gute Beinführung
- ⇒ rückklappbar für den einfachen Transfer

Seitliche
Kniepolster

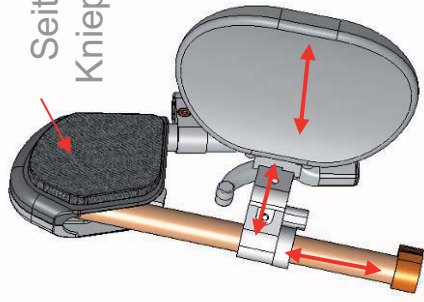

Abschwenkmechanismus

- ⇒ einfach bedienbar
- ⇒ für den Transfer einfach zu entfernen

XFamily Ansatz ⇒ Gleichteile zwischen BasiX/ RubiX/ Relax



Breezy RelaxX2 - Fussauflagen



Winkel- und tiefenpassbare Fussauflage

- ⇒ einfach anpassbar
- ⇒ komfortabel
- ⇒ tiefenpassbar durch drehen um 180°




Schmaler Raum zwischen den beiden Fussauflagen


- ⇒ sichert die Fussposition




Zwischenräume bei den verschiedenen Sitzbreiten

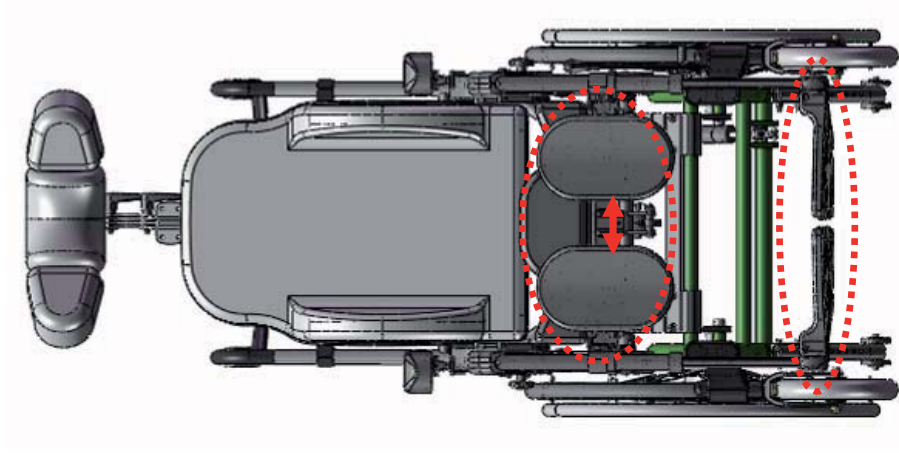

SW 41 cm



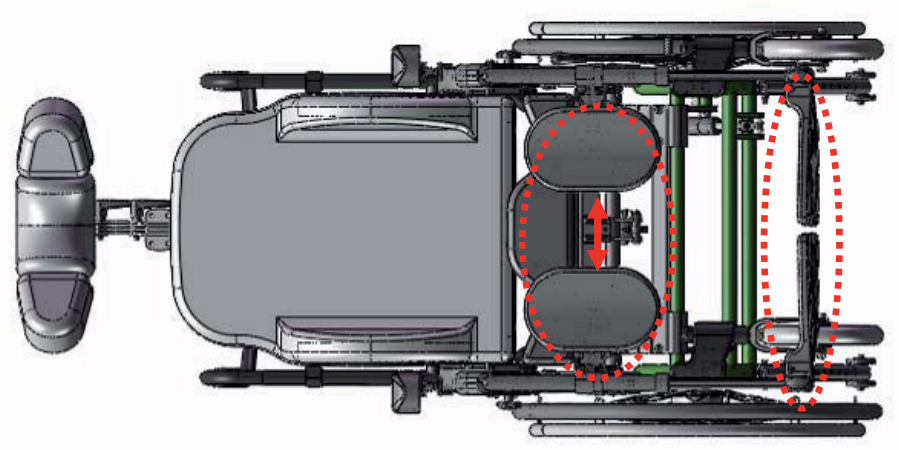


SW 46 cm


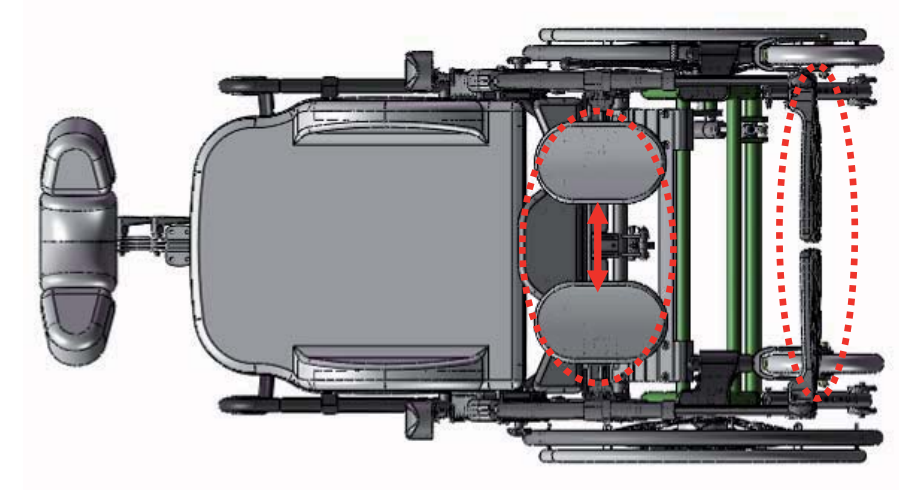


SW 51 cm

Breezy RelaxX² – Sitzhöhenbereiche

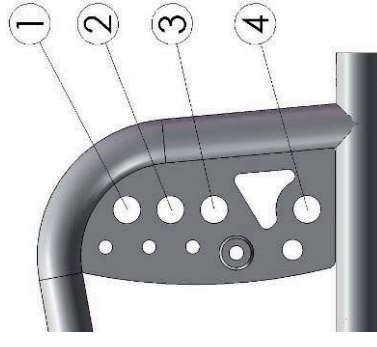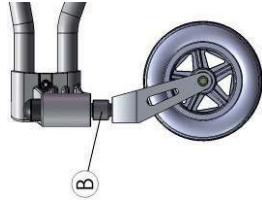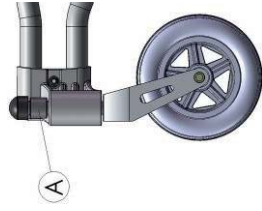

Sitzhöhe	Vorderrad-Aufnahme Abbildung A und B	Distanzstück Abbildung C und D	Hinterrad-Grösse	Vorderradgrösse	Hinterrad-Position Abbildung E
45.0 cm	1	B	24"	8"	1
47.5 cm	2	A	24"	8"	2
50.0 cm	2	B	24"	8"	3
45.0 cm	1	B	16"	8"	4

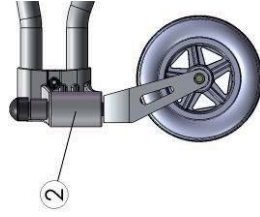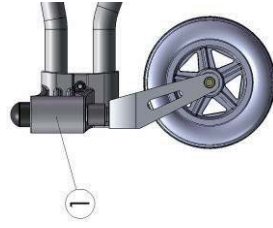

Breezy RelaX² - Antikippstütze



- Drehbare Antikippstütze mit integrierter Kipphilfe
(XFamily Teil)



Kniehebelbremse (Zugarretierungsbremse)

- ⇒ einfache Handhabung (erfordert wenig Kraft)
- ⇒ kein Konflikt mit den Fußstützen in der Bremsposition
- ⇒ keine Verlängerung nötig



entriegelt



gebremst

Breezy RelaxX² – Werkzeugsatz



Werkzeugsatz in Rückenschale integriert
⇒ immer zur Hand




Breezy RelaxX² – Faltmass



Einfache Demontage



Sicherung Gasdruckdämpfer

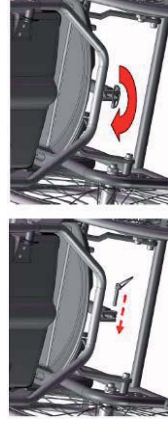

Vorklappbare Rückenlehne



Kompaktes Faltmass für den Transport



Breezy RelaxX² – Technische Daten



Sitzbreiten:	41 – 46 – 51 cm - 4 cm Polsterung Seitenteil (Std) +2 cm Distanzset (optional)
Sitztiefen:	42 - 50 cm (stufenlos einstellbar)
Sitzhöhen:	45 cm (8“ Lenk- / 16“ Hinterrad) 45 – 50 cm (8“ Lenk- / 24“ Hinterrad)
Rückenhöhe:	55 cm, 57.5 und 60 cm
Kippmechanismus:	0° - 25° / -3 – 22°
Rückenwinkelverstellung:	35°



Breezy RelaxX² – Technische Daten



Armauflage:	höhenverstellbar von 20 bis 33 cm (gemessen ab Sitzfläche)
Fussstützen:	Fussstütze höhenverstellbar mit Komfort Wadenauflage 70° Fussstütze (Länge einstellbar von 35 bis 50 cm)
Max. Benutzergewicht:	130 kg
Gewicht Rollstuhl:	ab 34 kg
Schwerstes Transportteil:	18 kg
Gesamtbreite:	SB plus 19 cm / SB plus 21 cm (bei Trommelbremse)



Breezy RelaxX² - Optionen



- Positionierungsgurt
- Geformte Armauflage (vielfältig einstellbar)
- Distanzset (+ 2 cm)
- Trommelbremse



Breezy RelaxX² - Optionen



- 16" Hinterrad mit Trommelbremse



- Therapietisch aufschiebbar





3-teilige Kopfstütze höhen-, tiefen- und winkeleinstellbar

zudem vor- und rückwärts positionierbar

- ⇒ einfach an die Kundenbedürfnisse anzupassen
- ⇒ erlaubt langes und komfortables Sitzen
- ⇒ einfach und ohne Werkzeug seitlich anpassbar



3-teilig

- ⇒ erhöht die Unterstützung der Kopfpositionierung

- **Seitliche Oberkörperunterstützung**
Seitenpelotten wegschwenk-/abnehm- und vielfach anpassbar (Länge, Tiefe, Höhe)



- **Abduktion**
Höhen- und tiefenanpass- und wegnehmbar



- **Stumpfauflage**



Breezy RelaxX² - Optionen



- **70° Fusstützen**
abschenk-, wegnehmbar (XFfamily kompatibel)



Breezy RelaxX² vs. Relax



Relax	RelaxX ²	Kommentar
Totalgewicht ab 42 kg	Totalgewicht ab 34 kg	
Max Benutzergewicht 140 kg	Max Benutzergewicht 130 kg	
Sitztiefe 38 - 50 cm	Sitztiefe 42 - 50 cm	
Sitzhöhe 45 - 52 cm	Sitzhöhe 45 - 50 cm	
Rückenhöhe 50 - 65 cm	Rückenhöhe 55 - 60 cm	JAY 3 Rücken nun wählbar
Sitzneigung -2° - 20°	Sitzneigung 0° - 25° / -3° - 22°)	Reduziert Druckbelastungen
Rückenwinkel 0 - 40°	Rückenwinkel 0 - 35°	
Gesamtbreite SB + 23 cm	Gesamtbreite SB + 20 cm	
Ohne Bremshebelverlängerung	Bremshebelverlängerung Standard	Benutzer kann die Bremse selber bedienen
Keine Familien Gleichteile	XFfamily kompatibel	Effektives Ersatzteilmanagement
Wuchtiges/schweres Aussehen	Modernes Aussehen	



- TÜV
- Crash-Test nach ISO 7176-19
- Biocomp
- Inflammability
- CE zertifiziert

Weitere Produktvorteile (gegenüber der Vorgängerversion)

- Verbesserte Sitzeinheit (Polster, Design, Sitzqualität)
- Reduzierte Gesamtbreite
- Erweiterter Bereich der Sitzneigung
- Verbesserte Optionen (Positionierung, Kopfstütze, ...)
- Einfach Handhabung
- Schnell und einfach zu unterhalten
- Gleichteile innerhalb der XFamily