



JAY J3 Rücken

Änderungen 2019

Ariane Albert
Juni 2019



I. J3 RÜCKEN

Der JAY J3 Rücken erfährt alle 3 Jahre ein Projekt, um den Lebenszyklus zu erhalten und die Marktposition zu sichern.

- **Erweiterung des Grössenangebots** für den MDC Rücken
- **Einführung einer zusätzlichen Konturtiefe** für MDC und DC Rücken
- **Vereinfachung** der Grössen-Matrix
- **Einführung von Whitmyer Kopfstützen**



II. POSITIONIERUNG

ZIELGRUPPE

Therapeuten wollen...

- einen festen Rücken, der leicht anzupassen und zu verordnen ist
- ein nutzerfreundliches und gleichzeitig die **klinisch effektivsten** Rückenunterstützung
- einen Rücken der praktisch und hoch funktionell ist (winkel-, tiefen-, höhen- und weiteinverstellbar)

Endnutzer und -nutzerinnen wollen...

- einen Rücken, der auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten ist
- Stabilität und gleichzeitig Mobilität für den Oberkörper
- keine Einschränkung in der Fahrperformance (Rücken darf nicht beim Antreiben des Rollstuhls behindern)
- einen Rücken, der anpassbar ist, um Rückenbeschwerden (z. B. Schmerzen, Instabilität) zu verhindern
- einen Rücken, der handhabbar und einfach in der Einstellung ist
- einen hochwertigen Look



II. POSITIONIERUNG

ZIELGRUPPE

Händler wollen...

- Eine komplette Bandbreite an Rückenformen und -größen, um unterschiedlichste Nutzeranforderungen abzudecken
- Einen Crash-Test geprüften Rücken
- Ein komplettes Portfolio von unterschiedlichsten Sitzlösungen (möglichst von einem Hersteller)



III. PRODUKT

1. USP'S



Auswahl an Konturen
und Grössen



Patentierte
Befestigungsklemme



Positionierungs-Set

III. PRODUKT

AKTUELLE UND NEUE GRÖSSENAUSWAHL

Aktuell					
	Flache Kontur (SC)	Mittlere K. (MC)	Mittlere Tiefe Kontur (MDC)	Tiefe Kontur (DC)	Beckentiefe Kontur (PDC)
Neu	Keine Änderungen	Keine Änderungen	5 Breiten (anstatt 4) 11 Höhen (anstatt 4) 2 Konturtiefen (anstatt 1)	2 Konturtiefen (anstatt 1)	Abgekündigt per 28.06.19

III. PRODUKT

NEUE GRÖSSENAUSWAHL

Mehr Grössen für den MDC Rücken:

Rückenhöhe	
Tiefer Rücken (LT)	Kurz (S) - 17
	Mittel (M) - 20
	Hoch (T) - 24

Rückenhöhe	
Mittlerer Rücken (MT)	Kurz (S) - 30
	Mittel (M) - 34
	Hoch (T) - 38

Rückenhöhe	
Hoher Rücken (UT)	Kurz (S) - 42
	Mittel (M) - 46
	Hoch (T) - 50

immer HD Ausführung

Rückenhöhe	
Schulterh. Rücken (SH)	Kurz (S) - 53
	Mittel (M) - 57
	Hoch (T) - 61

immer HD Ausführung



Schulterhoch (SH)



Hoch (UT)



Mittel (MT)



Tief (LT)

↓
Gleiches Design wie PDC LT

III. PRODUKT

NEUE AUSWAHL KONTURTIEFE

Konturtiefe


Flache Kontur (SC)
(Seitenpelotten verfügbar)



Mittlere Kontur (MC)
(Seitenpelotten verfügbar)



Tiefe Kontur (DC) /
Mittlere Tiefe Kontur (MDC)

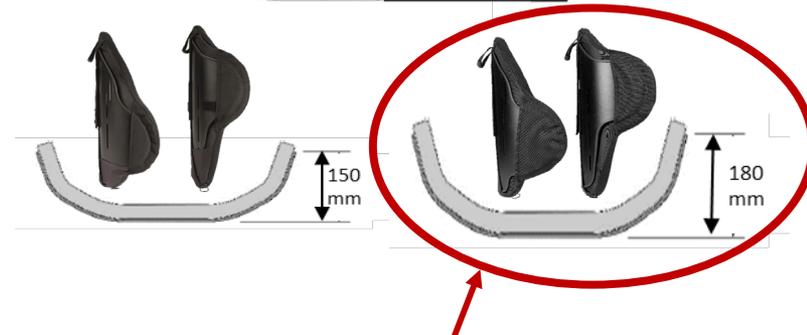

Neu!!!

III. PRODUKT

NEUE/ZUSÄTZLICHE TIEFE (BIS 180 MM) MDC UND DC RÜCKEN



Bild zeigt einen MDC Rücken mit aktueller Konturtiefe 150 mm.



Zusätzliche, neue Konturtiefe mit bis zu 180 mm (extra Tief).

- mehr seitliche Unterstützung
- Verbesserung der Stabilität
- Nutzer fühlt sich sicherer
- ggf. Verbesserte Sitztoleranz (Sitzdauer)
- insbesondere für Nutzer mit weiter Rückenbreite

III. PRODUKT

ZUSAMMENFASSUNG DER NEUEN AUSWAHL AN GRÖSSEN- UND KONTURTIEFEN



Shallow Contour
(SC)



Mid Contour
(MC)



Mid Deep
Contour (MDC)



Deep Contour
(DC)

4 Konturformen (SC, MC, MDC, DC), 4 Konturtiefen
12 Höhen

5 Rückenbreiten, um Rollstuhlbreiten von 31 bis 51 abzudecken

150 mm Konturtiefe in MT, UT und SH Höhe

180 mm Konturtiefe in MT und UT Höhe

III. PRODUKT

2. ZUSÄTZLICHE FEATURES



Whitmyer
Plush Polster
(P1000L)

AXYS
Halterung für
J3 Rücken
(J3EUHDXH)



Whitmyer
Konturiertes Polster
(P300L)

Cobra Halterung
abklappbar für J3
Rücken
(J3EUHDFH)

- Kopfstützen nur noch unter einer Marke – Whitmyer
- Bezug ist abnehmbar und waschbar bei 60°C
- Ersatzteile Bezug und Schaumstoff verfügbar über ET-Katalog
- Ansprechendes Design

III. PRODUKT

3. ABKÜNDIGUNGEN

- **JAY J3 Kopfstützenpolster**
 - J3EUHDLSP (JAY Kopfstütze - Standard)
 - J3EUHDLCP (JAY Nackenstütze - konturiert)

