

JAY EASY RÜCKEN

Einfach · Effektiv · Sitzen



EINFACH AUSWÄHLEN, BESTELLEN UND MONTIEREN

Mit der Erfahrung von JAY im Segment Sitzen und Positionieren wurde der JAY Easy Rücken entwickelt.

Einfach zu wählen: Eine der 2 Konturtiefen wählen, die Rückenhöhe und Supportansprüche bestimmen. Mit dem verfügbaren Zubehör können weitere Anpassungen vorgenommen werden.

Einfach zu montieren: Die Hardware ist so ausgelegt, dass der Rücken an alle gängigen Rollstuhlmodelle angepasst werden kann. Die Breite, Tiefe und Höhe sind mit nur einem Werkzeug leicht zu adaptieren.

Einfach zu nutzen: Die Schalenform kombiniert mit dem 3DX mikroklimatischen Bezug und dem hochwertigen Schaumstoff bietet dem Anwender eine effektive und komfortable Unterstützung.



Innovative Technologie

Der 3DX mikroklimatische Bezug mit Abstandsgewebe, der den weichen Schaumstoff des Rückens umschließt, sorgt für einen optimalen Wärme- und Feuchtigkeitstransport und stellt eine hohe Luftzirkulation sicher.



Einfach am Rollstuhl zu befestigen

Die Halterung des JAY Easy Rückens kann an alle gängigen Rollstuhlmodelle mit einem Durchmesser von 1.9 cm bis 2.5 cm montiert werden.

Ein automatischer Verriegelungsmechanismus garantiert, dass der Rücken beim Einhängen sicher befestigt ist. Bei Bedarf - z. B. beim Transport des Rollstuhls im Fahrzeug - lässt sich der Rücken schnell und einfach abnehmen.



Optimale Anpassung

Eine integrierte stufenlose Breiten- und Höhenverstellung von 5 cm hilft, den Rücken optimal an den Nutzer anzupassen. So kann z. B. ein 41 cm breiter Rücken an Rollstühle mit einer Rückenbreite von 41 cm bis 46 cm montiert werden (wichtig auch für den Wiedereinsatz).

Der Rückenwinkel kann ohne Verlust der Sitztiefe von -12° bis 12° individuell eingestellt werden.

Zubehörteile - wie Kopfstütze, Seitenpelotten, Lumbalkeile und Brustgurte - können bei Bedarf optional bestellt werden.



Wählen Sie die gewünschte Unterstützung

Das JAY EASY Rückensystem unterstützt eine aufrechte Körperhaltung und sorgt für eine stabile und ergonomische Sitzposition. Wählen Sie die gewünschte Konturtiefe.



Unterschiedliche Bedürfnisse verlangen eine adäquate Lösung. Die angebotenen Höhen bieten eine laterale bis eine volle laterale Unterstützung.



JAY EASY RÜCKEN

Rückenbreite:	36 / 41 / 46 / 51 cm
Rückenhöhe:	38 / 46 / 53 cm
Rückenwinkel:	+12° bis -12°
Gewicht:	2.4 kg
Max. Nutzergewicht:	136 kg
Zubehör:	Kopfstütze, Seitenpelotten, Lumbalunterstützung, Brustgurt
Sicherheit:	Crash getestet



Sunrise Medical AG

Erlenuweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch