



▷ **QUICKIE** REVOLUTION

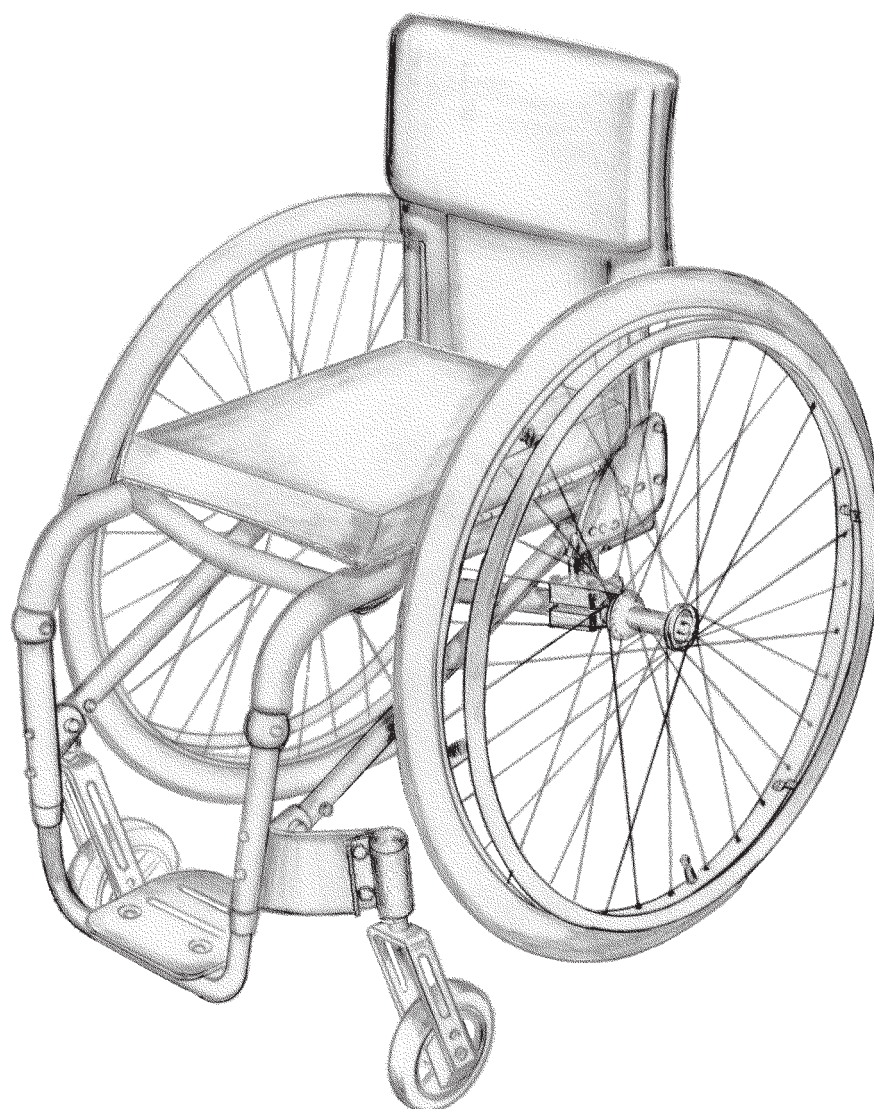

Manuel d'utilisation



FRANÇAIS

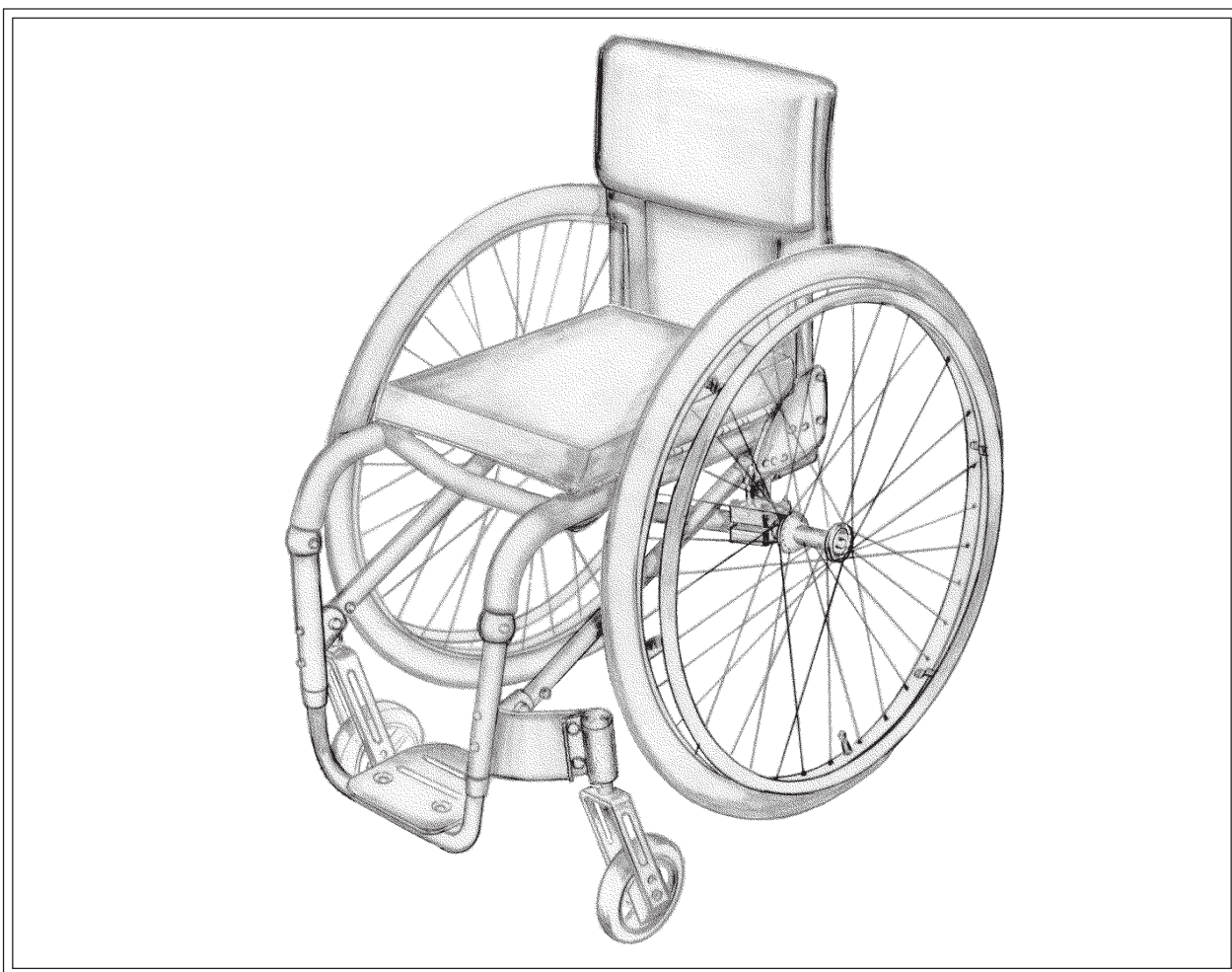

Comment utiliser ce manuel

Chez Sunrise Medical, nous souhaitons que vous exploitiez au mieux votre fauteuil roulant Quickie REVOLUTION. Ce manuel doit vous permettre de vous familiariser avec le fauteuil et ses caractéristiques. Il contient des conseils pour l'utilisation de tous les jours, pour l'entretien en général, des informations sur les normes de qualité que nous respectons, des détails sur la garantie. Il existe une large gamme d'accessoires et de réglages sur le Quickie REVOLUTION, pour obtenir de plus amples informations, contactez votre fournisseur de fauteuil roulant.

Votre fauteuil vous parviendra en parfait état ayant été vérifié avant de quitter notre usine. En suivant les directives de maintenance et de nettoyage pages 37-38, votre fauteuil conservera son parfait état et vous donnera entière satisfaction.

Pour la facilité d'utilisation ▲ indique un risque de blessure corporelle ou de dommage pour votre fauteuil et ⇨ indique des points permettant d'améliorer la performance et la sécurité de votre fauteuil.

Sommaire

Introduction	page 1
Garantie	page 2 - 3
Caractéristiques et options	page 4
Conseils de sécurité	page 5
Pliage et ouverture	page 6 - 7
Utilisation de votre fauteuil	page 8 - 19
Repose-pieds	page 20
Accoudoir	page 20 - 21
Roulettes anti-bascule (option)	page 22
Axes à déverrouillage rapide	page 22
Dossier	page 23
Freins	page 23
Réglages du fauteuil	page 24 - 36
Transport	page 37
Programme de maintenance	page 38
Directives de nettoyage, accessoires et outils	page 39
Données techniques	page 40
Sunrise Medical	page 41



Introduction

Sunrise se consacre à fournir des produits de qualité entièrement conformes aux prescriptions pour l'utilisation souhaitée.

Ce fauteuil roulant doit être utilisé pour aider les personnes à mobilité réduite ou privées de mobilité. Le fauteuil Quickie Revolution convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Le poids maximal de l'utilisateur de ces fauteuils est de 113 kg.

Sunrise est certifié BS EN ISO 9001, norme des systèmes de gestion qualité reconnue au niveau international.

Cette approbation garantit la fourniture des prestations de qualité dans tous les domaines de notre activité allant du développement à la livraison finale.

Ce produit est fabriqué pour être conforme à la directive CE 'directive de matériel médical' 93/42/CEE.



Si vous avez des questions concernant l'utilisation, la maintenance ou la sécurité de votre fauteuil roulant, veuillez contacter votre fournisseur de fauteuil.

Sunrise Medical se fera un plaisir de répondre à toute autre question que vous pourriez vous poser et pourra vous remettre une liste des revendeurs agréés de Sunrise Medical sur demande à:

SUNRISE MEDICAL

Z.I. ROUTE DE MESLAY

37210 PARÇAY-MESLAY

FRANCE

Telephone 02 47 88 58 36 Fax. 02 47 88 58 03

Numéro de série :

Inspecté par :

Votre distributeur local :

Votre distributeur local :

Garantie

Votre garantie

Le formulaire de garantie est inclus dans les documents Sunrise accompagnateur le fauteuil à la livraison. Remplir les renseignements adéquats et nous retourner le formulaire pour enregistrement. La garantie est informative.

ELLE N'AFFECTE EN AUCUN CAS VOS DROITS STATUTAIRES

Tous les fauteuils Quickie, pièces et composants (incluant les composants du cadre, les plaques d'axe, les roulettes, accoudoir, dossiers etc.) sont garantis contre tout vice de matériaux et de main d'oeuvre pendant deux années à compter de la date de l'achat.

Conditions de garantie

1. Cette garantie n'affecte pas les droits statutaires du client, mais si le client souhaite profiter de la garantie de la société, il devra se conformer aux dispositions ci-dessous.
2. En cas de défaut sur les produits livrés apparaissant dans la période de garantie qui commence à partir de la date de livraison, la société elle-même ou un agent de réparation agréé effectuera les réparations ou le remplacement nécessaire des pièces sans frais, à condition que le client respecte les dispositions suivantes de cette garantie.
3. Toute pièce réparée ou remplacée pendant la période de garantie est garantie pour le restant de cette période.
4. Les dispositions de réparations et d'entretien ainsi que le réparateur désigné seront indiqués au client par la société et seront confirmés à tout moment sur demande.
5. EN CAS DE DEFAUT SURVENANT PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE, LE CLIENT DOIT IMMEDIATEMENT AVISER LE REPARATEUR DESIGNÉ EN DECRIVANT LE PROBLEME EN DETAIL, LES PRODUITS NE DOIVENT PAS ETRE UTILISES, NI ETRE MODIFIES OU REPARES SANS AUTORISATION AVANT INSPECTION DU REPARATEUR DESIGNÉ.
6. Si le client utilise les produits hors de la localité du réparateur désigné, il devra contacter la société pour obtenir les coordonnées d'un autre réparateur agréé par la société. Si le client utilise les produits hors du R.U, il devra supporter les frais de transport, d'assurance et de conditionnement encourus pour la réparation ou le remplacement des produits par un réparateur agréé de la société.

7. Les pièces d'usure ne sont normalement pas couvertes pendant la période de garantie de 24 mois sauf si ces éléments ont subi une usure excessive directement due à un défaut de fabrication à l'origine.

Ces éléments incluent entre autres, les lubrifiants, les charbons de moteur, la toile, les pneumatiques, les chambres à air, les freins et pièces similaires. Les batteries seront couvertes par la garantie uniquement si elles ont été chargées et entretenues selon les recommandations du fabricant.

8. Dans des circonstances normales, aucune responsabilité ne sera acceptée si les produits ont nécessité une réparation ou un remplacement résultant directement :
 - a) du fait que les produits ou pièces n'ont pas été entretenus conformément aux recommandations du fabricant dans le cas où celles-ci existent et en utilisant exclusivement les pièces d'origine spécifiées.
 - b) du fait que les produits ou pièces ont été endommagés par négligence, accident ou utilisation impropre.
 - c) du fait que les produits ou pièces ont été modifiés par rapport aux spécifications du fabricant ou que des réparations ont été tentées avant que le réparateur désigné ait été notifié.
 - d) de l'usure normale.

Veuillez noter l'adresse et le numéro de téléphone de votre agent d'entretien local dans l'espace prévu sur la page précédente. En cas de panne, le contacter et essayer de lui fournir tous les détails possibles pour qu'il puisse vous aider rapidement.

Les fauteuils indiqués et décrits dans ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement à votre modèle. Cependant, toutes les instructions s'appliquent au même titre, quelles que soient les différences.

Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis, les poids, mesures ou autres données techniques indiquées dans ce manuel. Tous les chiffres, mesures et capacités indiqués dans ce manuel sont approximatifs et ne constituent pas de spécifications.

Ne pas oublier de remplir et de poster la carte d'enregistrement jointe à ce manuel. Sunrise Medical Limited vous recommande de ne pas entreprendre de maintenance autre que celle expliquée dans ce manuel. Votre agent d'entretien agréé local Sunrise Medical est formé par Sunrise Medical pour effectuer la maintenance détaillée lorsque nécessaire. Utiliser exclusivement les pièces de rechange Sunrise Medical.



Sunrise Medical Limited

High Street, Wollaston, West Midlands DY8 4PS England

Tel 01384 44 66 88 Fax 01384 44 66 99

www.sunrisemedical.co.uk



Garantie

Conditions - Applications MOBILITE

Applications de la garantie

- La garantie de base est de deux ans pour un fauteuil manuel et de un an pour un électrique.
- La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre retour dans les ateliers du fabricant.
- Le retour aux frais du fabricant doit se faire impérativement dans les emballages d'origine.
- Nous nous engageons à réduire au maximum le temps d'immobilisation de l'appareil.
- La garantie couvre toutes les pièces détachées à l'exception des pièces d'usure (pneumatiques, chambres à air, toiles, manchettes et poignées de poussées).
- La garantie s'applique dans les conditions normales d'utilisation, de stockage, de transport, et de maintenance définies dans les manuels utilisateur et technique du fabricant.

Limitations de garantie

- Les défauts causés par imprudence ou négligence ou usage impropre.
 - Les réparations ou modifications effectuées par des personnes non qualifiées ou avec des pièces détachées non d'origine.
 - Le stockage non approprié, chutes ou chocs
 - Le feu, accident ou catastrophe naturelle
 - Utilisation de consommable incompatible avec le produit. Utilisez ceux recommandés par **SUNRISE MEDICAL**
 - Usure normale résultante de l'utilisation de l'appareil
 - Mauvais entretien de l'appareil
 - Non-retrouv de la facture d'achat du produit concerné.
- (*) des avenants peuvent être signés pour modifier la durée de garantie.


Mise en oeuvre

Pour des raisons pratiques et des raisons de réduction des temps d'immobilisation du matériel, nous pourrions proposer aux services techniques le souhaitant de réaliser eux-mêmes les interventions dans leurs locaux. Dans ce cas, les pièces seront fournies sous garantie contre retour des anciennes, en mentionnant les numéros de série des appareils.

De telles dispositions illustrent l'existence concrète du partenariat entre nos clients et nous.

Dans la norme X 60-010 des notions de maintenance, il existe une référence aux textes réglementaires : *“La garantie légale est la garantie accordée par le vendeur pour protéger l'acheteur contre les conséquences des défauts ou vices cachés du bien vendu ou du service rendu conformément à la législation en vigueur : articles 1641 à 1649 du Code Civil. ... La garantie légale est d'application implicite et systématique. ... Une garantie contractuelle, consentie au titre d'un contrat, vient donc en complément de la garantie légale.”*

Caracteristiques et options

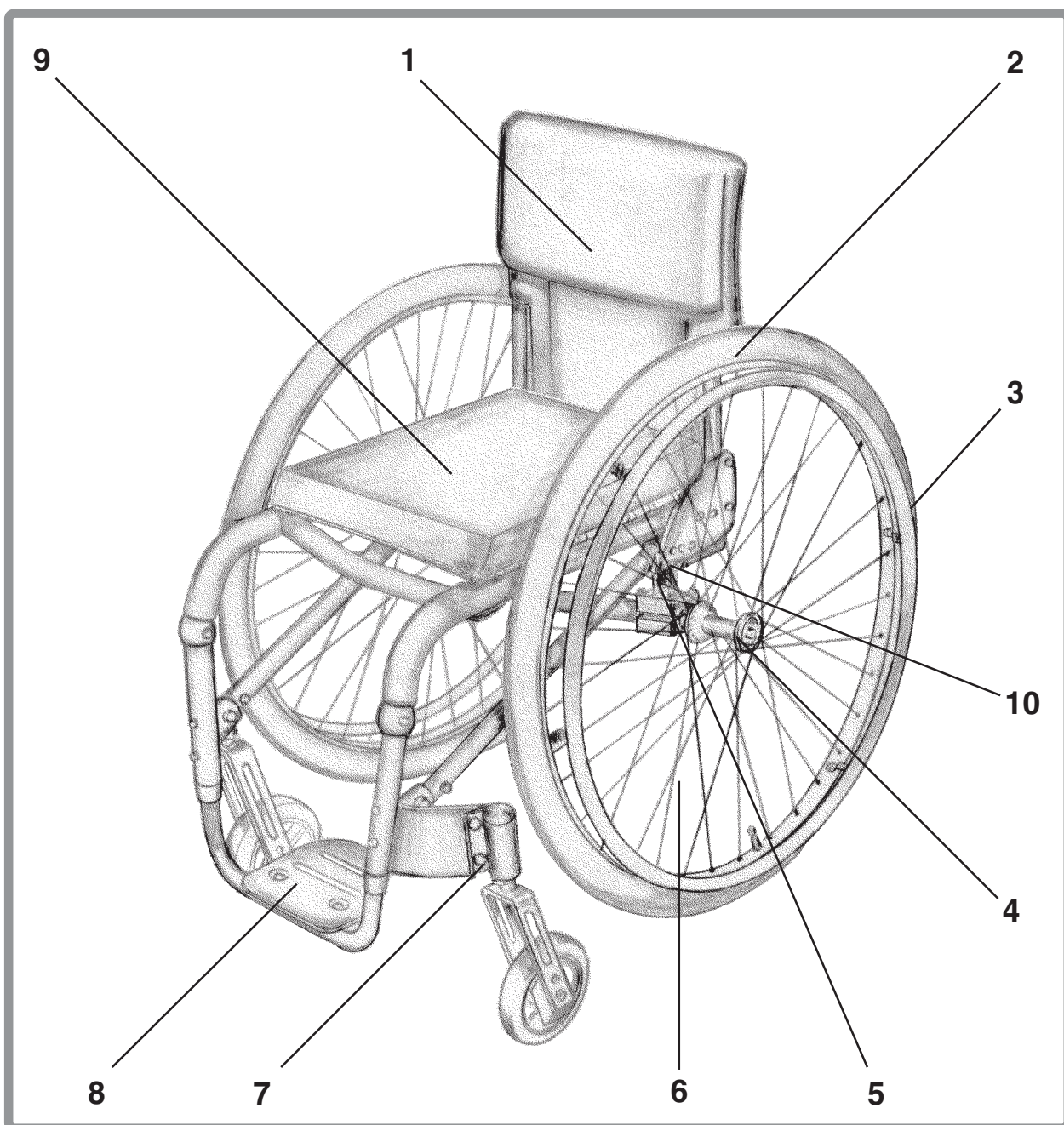

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Dossier | 7 Ensemble fourche |
| 2 Pneumatique | 8 Repose pieds réglable en hauteur et en angle |
| 3 Main courante en aluminium | 9 Toile d'assise |
| 4 Axe à déverrouillage rapide | 10 Entretoise hauteur de siège |
| 5 Plaque d'axe réglable | |
| 6 Roue à rayons | |

Certaines des options montrées dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Pour de plus amples informations contactez s'il vous plaît votre fournisseur local Sunrise.

Conseils de sécurité

Roulettes anti-bascule (en option)

Dans le cadre d'une utilisation normale, les roulettes anti-basculer empêchent le fauteuil de basculer en arrière. Les roulettes anti-basculer sont disponibles chez votre fournisseur local de fauteuil.

Sunrise Medical recommande les roulettes anti-basculer lors de l'utilisation d'un fauteuil pour la première fois ou aux utilisateurs moins expérimentés.

Pression des pneumatiques

S'assurer que les pneumatiques sont bien gonflés. La pression correcte des pneumatiques est de 450 kilopascals /4.5 bar pour les roues arrière et de 250 kilopascals/ 2.5 bar pour les roulettes. Une pression de pneumatique faible peut entraîner le glissement des freins arrière.

Accoudoir (en option)

Toujours fixer les accoudoirs avant d'utiliser le fauteuil. Ne jamais soulever le fauteuil par les accoudoirs. Ces éléments sont amovibles et le fait de soulever le fauteuil par les accoudoirs pourrait abîmer le fauteuil et / ou blesser l'utilisateur.

Basculements

Les basculements (basculer le fauteuil vers l'arrière jusqu'à son point d'équilibre) sont dangereux car le fauteuil peut se renverser. Les basculements ne doivent être faits que par des personnes expérimentées. Ne pas tenter d'apprendre ou d'utiliser cette manoeuvre sans l'aide d'un accompagnateur.

Repose-pieds

Le point le plus bas des palettes du repose-pieds doit être à au moins 63 mm du sol pour laisser un dégagement adéquat. Ne jamais se mettre debout sur le repose-pieds car le fauteuil pourrait basculer.

Bords de trottoirs, pentes, obstacles et dénivellations

Toujours s'entraîner avec un accompagnateur qualifié avant de tenter de négocier des bords de trottoirs, pentes ou dénivellations seul. Il est important de développer des techniques sûres adaptées à ses propres capacités. Ne pas tenter de monter ou de descendre des pentes supérieures à 10%.

Transferts

Des directives sur la façon d'effectuer un transfert latéral sont fournies dans ce manuel, cependant, il ne s'agit que d'une méthode de transfert, il vous faudra développer une technique avec votre fournisseur de fauteuil qui s'adaptera le mieux possible à vos capacités.

Pliage et ouverture

Pliage

Retirer les deux roues arrière (Fig. 1), en appuyant sur l'axe à déverrouillage rapide (1) situé dans le moyeu (2), saisir la roue par les rayons (3) autour du moyeu et sortir l'axe de son guide (4).

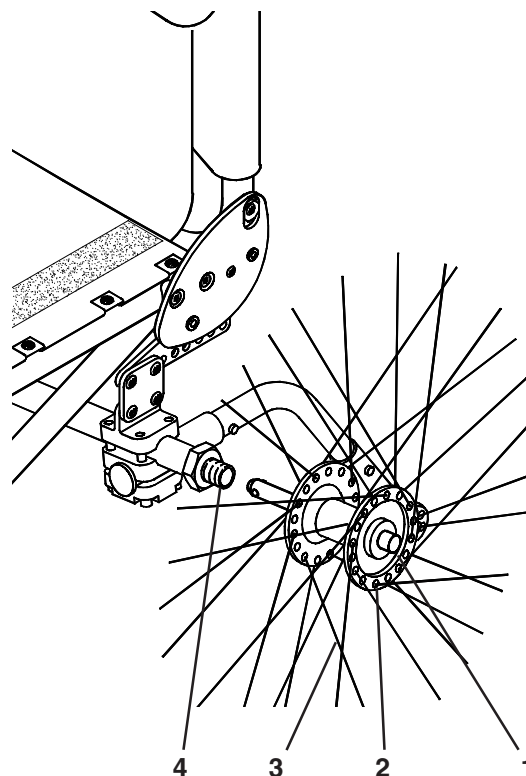


Fig. 1

En se tenant derrière le fauteuil (Fig. 2) saisir fermement le tube support du dossier (1). Tirer sur le cordon de déblocage du dossier (2) et pousser le dossier vers l'avant et vers le bas jusqu'à ce qu'il atteigne sa position demi-pliée (comme sur la Fig. 3).

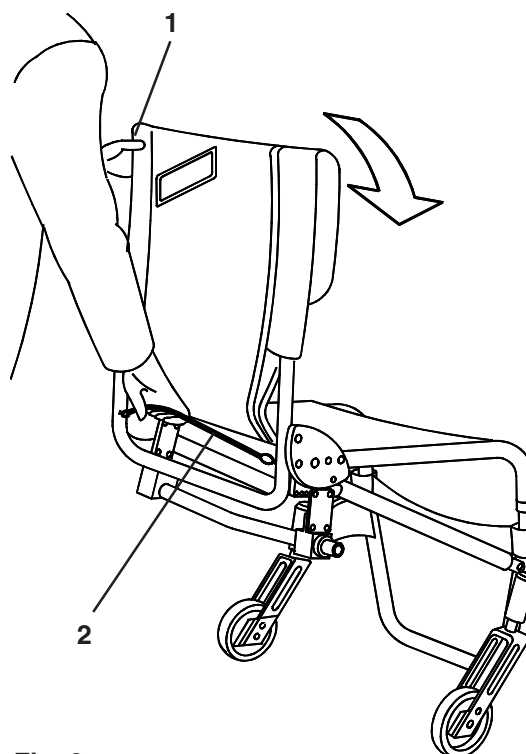


Fig. 2

Pliage et ouverture

Position semi-pliée

Relâcher le cordon du dossier et tenir le fauteuil comme illustré sur la Fig. 3 (position semi-pliée) tirer le cordon de déblocage du verrouillage du cadre principal (4) et tirer la barre de carrossage (5) vers vous jusqu'à ce que les roues avant (6) soient parallèles au cadre du siège (7). Voici la position entièrement fermée. (Fig. 4).

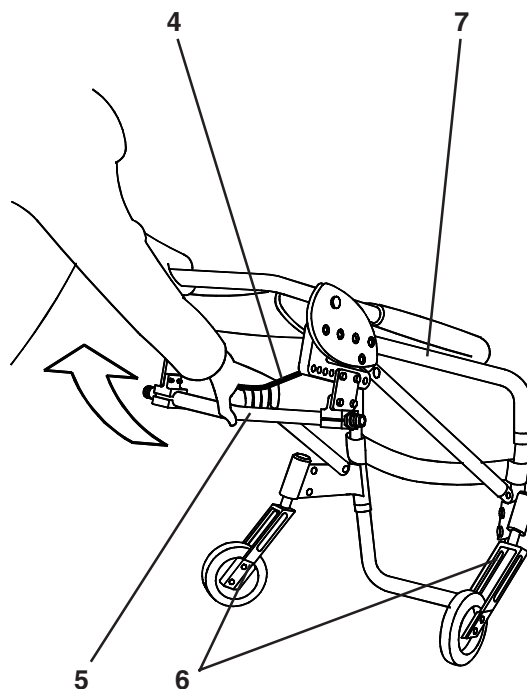


Fig. 3

Ouverture

En se tenant derrière le fauteuil, tenir le bas du tube du dossier et pousser la barre de carrossage jusqu'à ce que le cadre se verrouille en position.

Tirer le dossier vers le haut jusqu'à sa position et s'assurer que le tout est bien verrouillé.

Replacer les roues en faisant glisser l'axe dans le guide jusqu'à ce que l'axe ressorte.

⚠ Attention

L'axe n'est pas fixé tant que le bouton à déverrouillage rapide vers l'extérieur n'est pas entièrement ressorti.

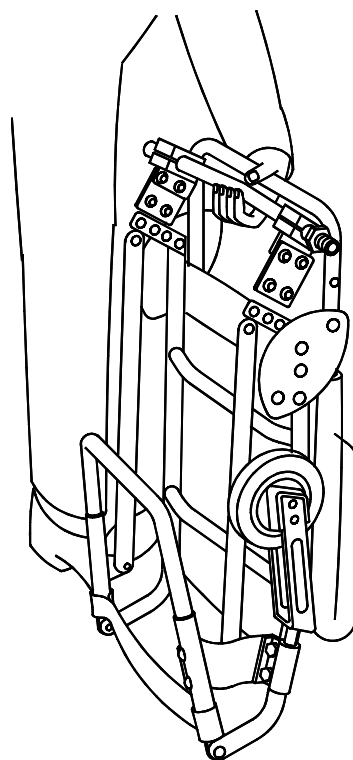


Fig. 4

Utilisation de votre fauteuil

Eau, neige et verglas

Le contact avec l'eau, la neige ou le verglas peut affecter la performance de votre fauteuil.

1. Ne jamais utiliser votre fauteuil dans une piscine ou autre plan d'eau.
2. Si votre fauteuil est humide, ou si vous utilisez de l'eau pour le nettoyer, bien le sécher aussi rapidement que possible.

Lorsque vous avez besoin d'aide

▲ Attention:

Si vous ne respectez pas les avertissements suivants, vous pouvez tomber ou vous renverser et vous blesser sérieusement ainsi que votre accompagnateur.

A l'attention de l'utilisateur du fauteuil:

S'assurer que les personnes vous aidant ont lu et suivent tous les conseils et les instructions s'appliquant à cette utilisation. Avant d'utiliser ce fauteuil, chaque accompagnateur doit savoir que faire pour assurer la sécurité.

A l'attention des accompagnateurs:

1. Mettre l'utilisateur du fauteuil à l'aise. Lui dire ce que vous avez l'intention de faire et lui expliquer ce qu'il est supposé faire.

2. Travailler avec le médecin, l'infirmière ou le thérapeute de l'utilisateur pour apprendre les méthodes sûres les mieux adaptées à vos capacités et à celles de l'utilisateur.
3. Toujours utiliser la bonne position et la mécanique corporelle adéquate. Pour soulever l'utilisateur ou le fauteuil, plier les genoux légèrement et tenir le dos aussi droit que possible.
4. Déverrouiller et faire tourner les roulettes anti-bascule en les relevant et en les écartant pour éviter une chute lorsque le fauteuil est utilisé par l'arrière.
5. Toujours bloquer les roues arrière et les roulettes anti-bascule en position basse si vous devez laisser l'utilisateur seul, ne serait ce qu'un moment. Ceci réduira le risque d'une chute ou d'une perte de contrôle du fauteuil.

Utilisation de votre fauteuil

Centre d'équilibre

⚠ Attention:

Le point où ce fauteuil va basculer en avant, en arrière ou sur le côté dépend de son centre d'équilibre et de sa stabilité. Si vous ne respectez pas ces conseils, il peut y avoir chute et vous pouvez vous blesser sérieusement:

1. Le réglage le plus important de votre fauteuil est la position des roues arrière. Plus vous déplacez les roues arrière vers l'avant, plus il est probable que votre fauteuil va basculer vers l'arrière.

Consultez votre médecin, infirmière ou thérapeute pour déterminer la meilleure position vous concernant.

2. Le fait de modifier le réglage de ce fauteuil augmente le risque d'une chute ou d'un renversement. Faire très attention si vous modifiez l'un des éléments suivants :

⇒ La position des roues arrière, la distance entre les roues arrière ou le carrossage des roues arrière.

⇒ La distance entre le centre des roues avant et les roues arrière et l'angle des roues.

3. Pour éviter une chute ou un renversement, il faut :
- ⇒ avoir quelqu'un qui vous aide jusqu'à ce que vous connaissiez les points d'équilibre de votre fauteuil et comment éviter un renversement.

⇒ utiliser les roulettes anti-bascule jusqu'au moment où vous serez sûr de pouvoir éviter un renversement.

4. Le centre d'équilibre et la stabilité du fauteuil sont également perturbés par :
- ⇒ un déplacement de la position de votre corps, de la posture ou de la répartition du poids.
- ⇒ le fait d'utiliser le fauteuil sur une surface en pente.
- ⇒ les systèmes d'assise montés (en option).

Se référer aux sections suivantes pour apprendre comment réduire le risque d'une chute ou d'un renversement par une utilisation adaptée de ce fauteuil.

S'habiller et changer ses vêtements

⚠ Attention:

Il peut y avoir un déplacement de votre poids si vous vous habillez ou changez de vêtement tout en étant assis dans ce fauteuil. Ceci peut entraîner une chute ou un renversement et de sérieuses blessures. Pour éviter cela, il faut:

1. Tourner les roues avant en position avant.
2. Verrouiller les roulettes anti-bascule en position basse si votre fauteuil est équipé.
3. Adosser votre fauteuil à un mur et verrouiller les deux roues arrière.

Utilisation de votre fauteuil

Basculements (Equilibre sur roue arrière)

Le basculement se fait sur les roues arrière de votre fauteuil en faisant décoller les roues avant du sol. Si cette manoeuvre est maîtrisée, elle peut vous aider à passer les bords de trottoir et autres obstacles.

▲ Attention:

Il est dangereux d'effectuer un basculement, car vous pouvez basculer en arrière et vous retrouver avec de sérieuses blessures. Bien suivre ces conseils:

1. Voir avec le médecin, l'infirmière ou le thérapeute si vous pouvez apprendre à effectuer un basculement.
2. Ne pas le faire tant que vous n'êtes pas très expérimenté sauf si l'on vous aide.
3. S'assurer que les roulettes anti-basculer sont remontées et écartées pour ne pas gêner.
4. Pour apprendre à faire un basculement, s'assurer que le fauteuil a des poignées à pousser. L'accompagnateur a besoin de points fixes pour tenir l'arrière du fauteuil et empêcher l'utilisateur de basculer en arrière.

Suivre ces étapes pour apprendre à faire un basculement avec de l'aide:

1. L'accompagnateur doit être à l'arrière du fauteuil et doit pouvoir suivre le fauteuil pour l'empêcher de basculer.
2. Les mains de L'accompagnateur doivent être sous les poignées, prêtes à vous saisir si vous basculez trop en arrière.
3. Lorsque L'accompagnateur est en place, placer vos mains sur la partie avant des mains-courantes.
4. Exécuter un mouvement rapide vers l'arrière des roues arrière, immédiatement suivi d'une forte poussée vers l'avant. Ceci va faire basculer le fauteuil vers l'arrière et soulever les roues avant du sol.
Essayer de trouver le point d'équilibre qui est le point qui va vous permettre de ne basculer, ni vers l'avant, ni vers l'arrière.
5. Maintenir votre équilibre par de petits mouvements des mains-courantes.

Utilisation de votre fauteuil

Passages de porte et obstacles

⚠ Attention:

1. Dans la mesure du possible, s'assurer que les sols où vous utilisez le fauteuil sont à niveau et dégagés de tout obstacle :
 - ⇒ en retirant ou en couvrant les barres de seuil entre les pièces,
 - ⇒ en installant une rampe aux portes d'entrée et de sortie.
2. Si votre fauteuil a des roulettes anti-bascule, s'assurer que vous les verrouillez bien en position basse avant de passer un obstacle.
3. Garder les deux mains sur les mains-courantes. Sans cela, vous pouvez perdre le contrôle de votre fauteuil et basculer.
4. Ne pas faire avancer le fauteuil en poussant ou en tirant sur un objet. Ne jamais se tenir à un montant de porte avec une ou deux mains pour avancer.
5. Pour rectifier le centre d'équilibre de votre fauteuil:
 - ⇒ pencher légèrement le haut du corps vers l'avant lorsque vous passez un obstacle.
 - ⇒ appuyer le haut du corps vers l'arrière pour passer d'un point élevé à un point inférieur.

Attraper quelque chose ou se pencher

⚠ Attention:

Attraper quelque chose ou se pencher modifie le centre d'équilibre de votre fauteuil si vous ne suivez pas ces instructions, une chute ou un renversement peuvent se produire et entraîner de sérieuses blessures.

1. Eviter d'essayer d'attraper quelque chose ou de vous pencher si vous devez déplacer votre poids pour ce faire. Le fait de se déplacer vers l'avant dans votre fauteuil peut faire basculer le fauteuil vers l'avant. Toujours maintenir la partie inférieure du dos en contact avec le dossier. Demander de l'aide ou utiliser un appareil pour étendre votre portée.
2. Ne jamais attraper des deux mains. Cela vous empêcherait de vous rattraper et d'éviter une chute si le fauteuil bascule.
3. Ne jamais se pencher en arrière pour attraper un objet sauf si votre fauteuil est équipé de roulettes anti-bascule et qu'elles sont verrouillées en position basse.

Utilisation de votre fauteuil

Attraper quelque chose ou se pencher (suite)

4. Si vous devez essayer d'atteindre quelque chose ou si vous vous penchez hors de votre fauteuil:
- ⇒ tourner les roues avant vers la position avant. Pour ce faire, déplacer votre fauteuil au delà de l'objet puis faire une marche arrière.
 - ⇒ placer votre fauteuil aussi près que possible de l'objet que vous souhaitez attraper.
 - ⇒ saisir fermement un accoudoir d'une main. Ceci vous aidera à éviter une chute si le fauteuil bascule.
 - ⇒ éviter de mettre la pression sur les repose-pieds pour attraper quelque chose. Ceci pourrait faire basculer le fauteuil.
 - ⇒ ne pas verrouiller les roues arrières. Ceci crée un point de basculement et renforce la probabilité d'une chute ou d'un renversement.

Pentes et côtes

⚠ Attention:


Le fait de monter ou de descendre une pente (Fig. 3) ou de rouler à flanc de coteau (Fig. 4) modifie le centre d'équilibre de votre fauteuil. Si vous ne suivez pas ces instructions, vous pouvez vous blesser lors d'une chute ou d'une perte de contrôle:

1. Pencher ou appuyer votre corps vers l'amont pour rectifier la modification du centre d'équilibre.
2. Eviter de tourner sur une pente ou à flanc de coteau car il est probable que vous basculiez. Toujours aller aussi droit que possible vers le haut ou vers le bas.
3. Etre très attentif pour monter une pente à inclinaison supérieure à 10%. Demander de l'aide si la pente est trop raide pour vous.
 - ⇒ Sur une pente raide, les roulettes anti-basculer n'empêcheront pas un renversement.
 - ⇒ Sur une pente raide, il se peut que vous ne puissiez pas atteindre le haut de la pente sans vous arrêter. Si vous devez vous arrêter, mettez-vous en travers de la pente sinon vous pouvez perdre le contrôle du fauteuil et basculer.

Utilisation de votre fauteuil


Pentes et côtes (suite)

4. Toujours contrôler votre vitesse lors de la descente. Si vous allez trop vite, vous ne pourrez peut-être pas contrôler votre fauteuil. Demander de l'aide si la pente est trop raide pour vous.
- ⇒ Vous pouvez contrôler votre vitesse en maintenant une pression constante sur les mains-courantes.
 - ⇒ Ne jamais utiliser les freins arrière pour essayer de ralentir ou d'arrêter votre fauteuil, cela pourrait vous faire perdre le contrôle ou basculer.

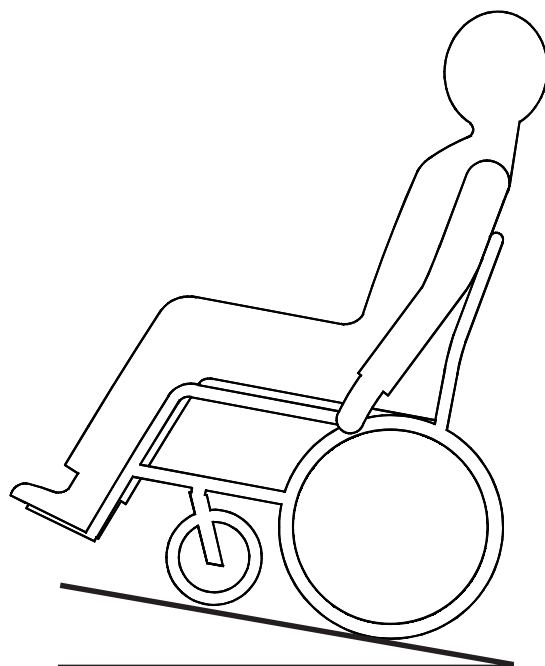

10% de pente maximum

Fig. 5

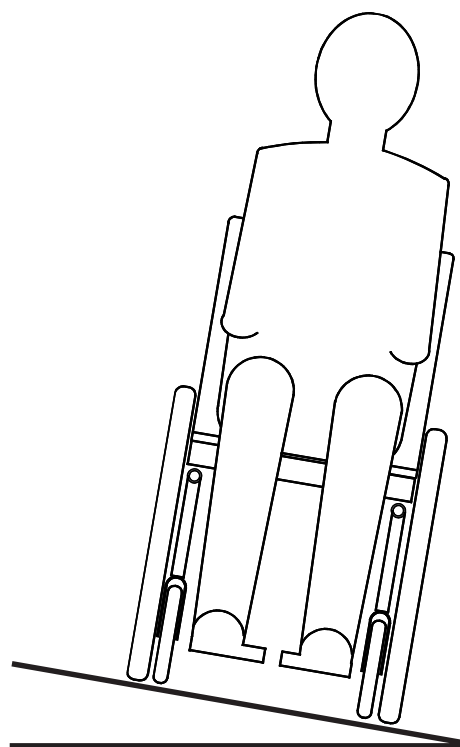

10% de pente maximum

Fig. 6

Utilisation de votre fauteuil

Transferts

▲ Attention:

Si vous ne respectez pas ces avertissements, une chute peut survenir et entraîner des dommages corporels sur votre personne:

1. Les transferts nécessitent un bon équilibre et une certaine agilité, ils sont très dangereux. Ne pas oublier qu'il y a un moment lors de chaque transfert où le siège du fauteuil ne se trouve plus sous vous.
2. Pour éviter une chute, vous devez:
 - ⇒ apprendre à placer votre corps et à vous tenir pendant le transfert.
 - ⇒ travailler avec votre médecin, infirmière ou thérapeute pour apprendre des méthodes sûres de transfert.
 - ⇒ vous faire aider par quelqu'un jusqu'au moment où vous serez sûr de pouvoir faire le transfert seul.
3. Dans la mesure du possible, placer votre fauteuil comme indiqué Fig. 7 et 8.
4. Toujours verrouiller les roues arrière avant de faire le transfert pour empêcher le fauteuil de rouler.
Le fait de bloquer les roues arrière n'empêche pas systématiquement le fauteuil de glisser ou de basculer.

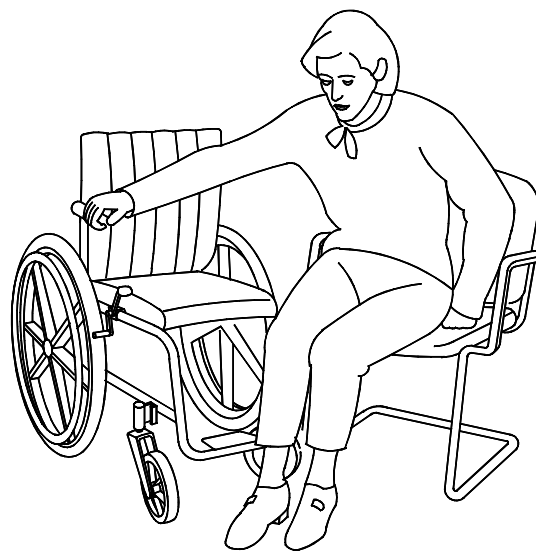


Fig. 7

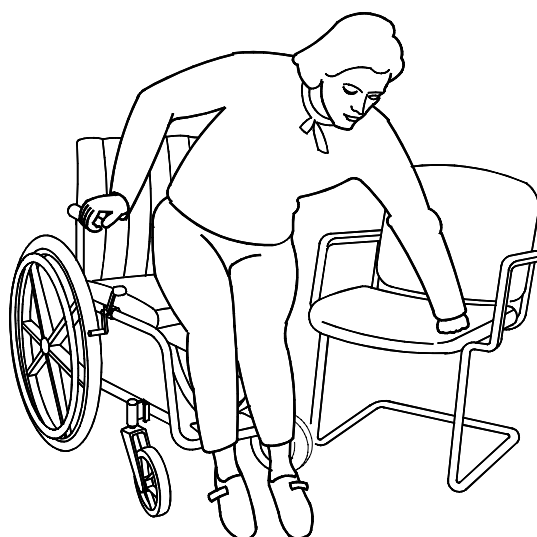


Fig. 8

Utilisation de votre fauteuil


5. Tourner les roulettes vers l'avant pour donner plus de stabilité au fauteuil.
6. Si votre fauteuil a des accoudoirs, s'assurer qu'ils ne gênent pas.
7. Faire attention au repose-pieds. Pour éviter une chute ou un renversement lors du transfert:
 - ⇒ S'assurer que vos pieds ne pendent pas ou ne sont pas bloqués par le repose-pieds.
 - ⇒ Eviter de prendre appui sur le repose-pieds car le fauteuil peut basculer vers l'avant.
 - ⇒ Si possible retirer ou faire basculer le repose-pieds vers l'extérieur.
3. Ne pas essayer de monter un bord de trottoir ou une marche de plus de 10 cm de haut sauf si vous avez de l'aide; votre fauteuil peut dépasser son point d'équilibre et basculer (Fig. 9).
4. Si vous avez un accompagnateur, s'assurer que le fauteuil a des poignées à pousser. L'accompagnateur doit avoir des points sûrs pour tenir l'arrière du fauteuil.

Bords de trottoir et marches

⚠ Attention:

Si vous ne suivez pas ces conseils, une chute ou un renversement peut survenir et provoquer de sérieuses blessures pour vous ou d'autres personnes:

1. Ne jamais essayer de monter ou de descendre un bord de trottoir ou une marche (Fig. 9) sans être expérimenté et sauf si :
 - ⇒ vous pouvez faire un basculement sûr et
 - ⇒ vous êtes certain d'avoir la force nécessaire pour le faire.
2. Débloquer et faire tourner les roulettes anti-basculer vers le haut et l'extérieur pour qu'elles ne gênent pas.

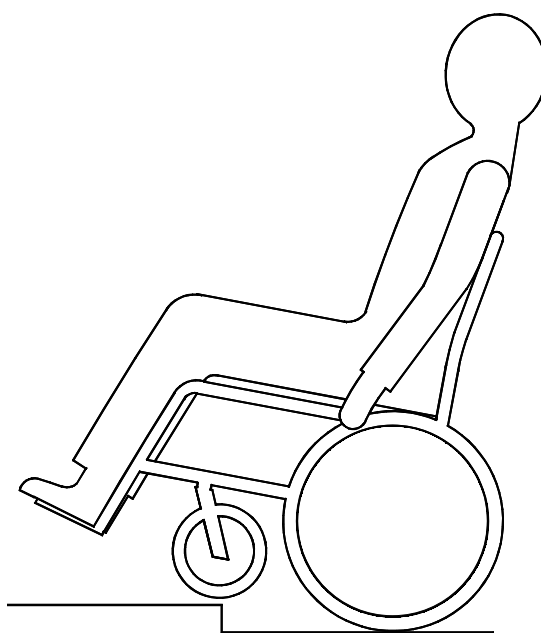

10 cm de Hauteur maximale de trottoir.


Fig. 9

Utilisation de votre fauteuil

Conseils pour descendre un bord de trottoir ou une marche avec de l'aide.


Lire et suivre les avertissements destinés aux accompagnateur. Pour aider l'utilisateur à descendre un bord de trottoir ou une marche vers l'arrière:

1. S'assurer que les poignées à pousser ne vont pas tourner ou glisser.
2. Toujours se mettre derrière le fauteuil (Fig. 10).
3. Avant d'atteindre le bord du trottoir ou de la marche, tourner le fauteuil et le tirer vers l'arrière.
4. En regardant par dessus votre épaule, descendre soigneusement d'un niveau jusqu'à avoir passé l'obstacle et se retrouver sur le niveau inférieur.
5. Tirer le fauteuil vers vous jusqu'à ce que les roues arrière atteignent le bord du trottoir ou de la marche. Puis laisser les roues arrière rouler lentement sur le niveau inférieur (Fig. 11).
6. Lorsque les roues arrière se retrouvent sur le niveau inférieur, faire basculer le fauteuil jusqu'à son point d'équilibre. Ceci pour décoller les roulettes du bord du trottoir ou de la marche.
7. Maintenir la position d'équilibre et faire quelques petits pas en arrière. Tourner le fauteuil et abaisser doucement les roues avant au sol.

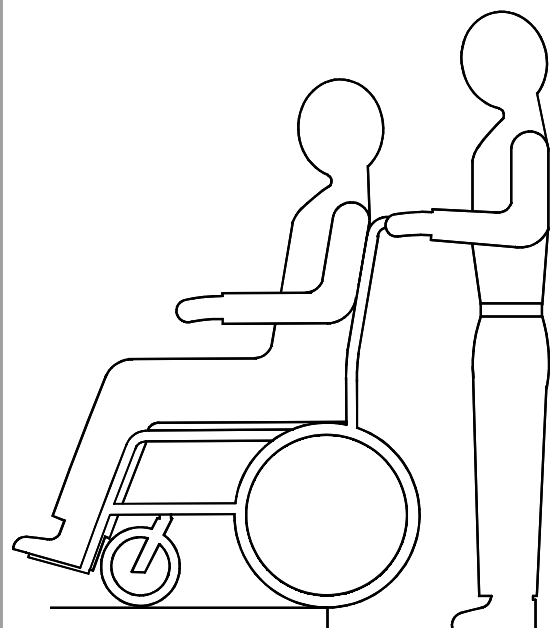

Hauteur maximale du bord du trottoir 10 cm

Fig. 10

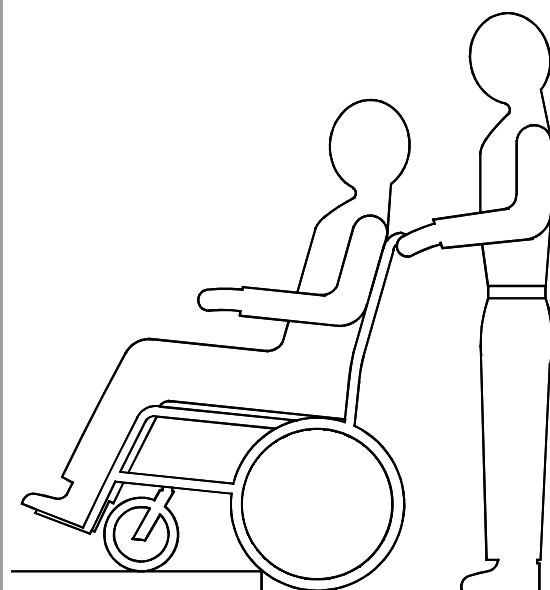

Hauteur maximale du bord du trottoir 10 cm


Fig. 11

Utilisation de votre fauteuil

Conseils pour monter un bord de trottoir ou une marche avec de l'aide.


Lire et suivre les conseils destinés aux accompagnateurs. Pour aider l'utilisateur à monter un trottoir ou une marche vers l'avant:

1. Toujours se tenir derrière le fauteuil.
2. Faire face au bord trottoir et basculer le fauteuil sur les roues arrière pour que les roues avant passent le bord du trottoir ou la marche (Fig. 12).
3. Avancer en plaçant les roues avant sur le niveau supérieur dès que vous êtes sûr d'avoir passé le bord.
4. Continuer à avancer jusqu'à ce que les roues arrière touchent la face du bord du trottoir ou la marche (Fig. 13). Soulever et passer les roues arrière sur le niveau supérieur.

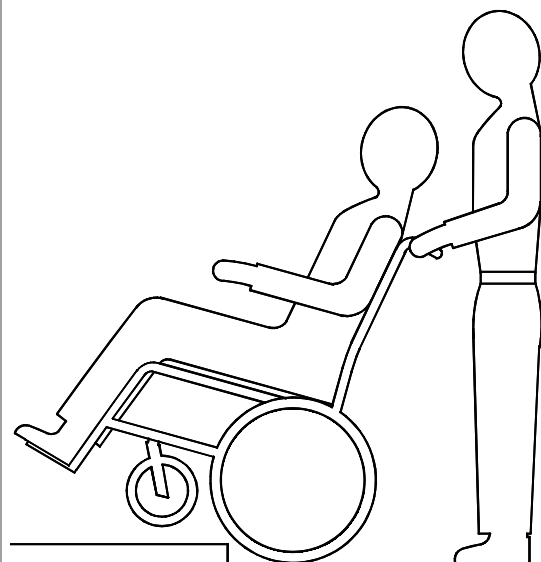

10 cm de hauteur maximale de trottoir.

Fig. 12

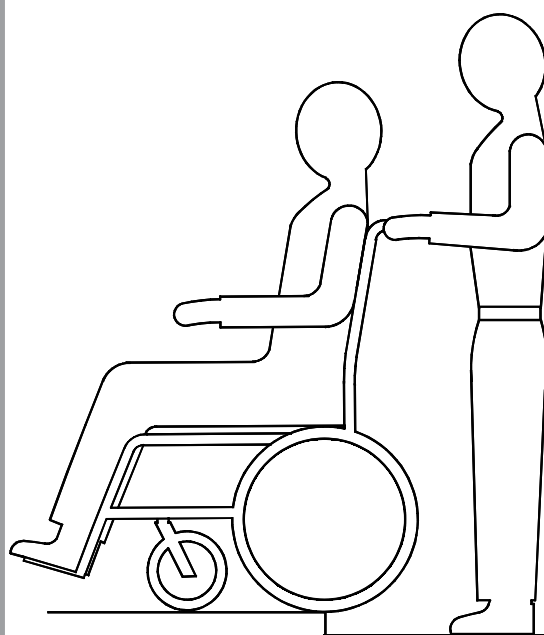

10 cm de hauteur maximale de trottoir.

Fig. 13

Utilisation de votre fauteuil

Déplacer un fauteuil et son utilisateur dans les escaliers

⚠ Attention:

Dans la mesure du possible, éviter cette manoeuvre pour éviter de blesser l'accompagnateur.

Lire et suivre les avertissements destinés aux accompagnateurs, sans quoi une chute ou un basculement peuvent survenir et entraîner de sérieuses blessures pour l'utilisateur et / ou les accompagnateurs:

1. Deux accompagnateurs sont nécessaires pour déplacer un fauteuil et son occupant dans des escaliers (Fig. 14).
2. S'assurer que ce fauteuil a des poignées et que les poignées ne vont pas tourner ou glisser. L'accompagnateur, à l'arrière, doit avoir une bonne prise pour supporter le poids du fauteuil et de son occupant.
3. Utiliser les parties non amovibles du châssis principal comme prises.
4. S'assurer que l'occupant est bien assis et que ses pieds, bras et mains sont bien positionnés pour éviter tout obstacle.

Conseils pour monter un escalier avec de l'aide

Lire et suivre les conseils destinés aux accompagnateurs.

Suivre ces étapes pour aider l'utilisateur à monter l'escalier:

1. Monter le fauteuil et son occupant dans l'escalier par l'arrière.
2. L'accompagnateur à l'arrière a le contrôle de l'opération. Il fait balancer le fauteuil en arrière jusqu'à son point d'équilibre (Fig. 14).
3. La deuxième personne devant saisit fermement une partie non amovible du châssis avant et soulève le fauteuil pour lui faire passer une marche à la fois.
4. Les accompagnateurs se repositionnent sur la marche suivante et répètent la même opération pour chaque marche. En arrivant à l'étage, remettre le fauteuil en position droite.



Utilisation de votre fauteuil

Conseils pour descendre un escalier avec de l'aide

Lire et suivre les instructions pour accompagnateurs.

Suivre ces étapes pour aider l'utilisateur à descendre les escaliers:

1. Tirer le fauteuil et l'utilisateur vers l'avant pour descendre l'escalier (Fig. 15).
2. L'accompagnateur à l'arrière contrôle l'opération. Il fait basculer le fauteuil jusqu'au point d'équilibre des roues arrière et avance jusqu'au bord de la marche du haut.
3. Une deuxième aide se tient sur une marche inférieure et saisit le cadre du fauteuil. Les deux personnes font descendre le fauteuil d'une marche à la fois en laissant les roues arrière rouler sur le bord de la marche.
4. Les aides passent à la marche suivante et répètent la même procédure pour chaque marche. En arrivant en bas, remettre le fauteuil en position verticale.



Fig. 15

Caracteristiques du fauteuil

Repose-pieds réglable au niveau de l'angle

Le fauteuil Revolution version standard a un repose-pieds réglable au niveau de l'angle et de la hauteur (Fig. 16).

cf: Feuilles de mesure

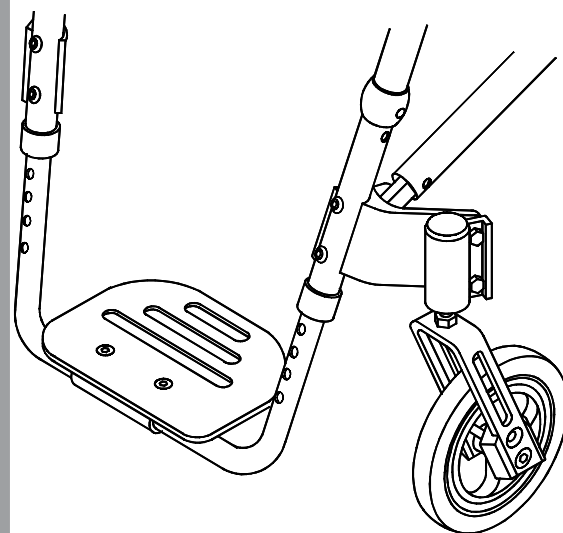


Fig. 16

Accoudoirs escamotables (en option)

Votre fauteuil Revolution peut être fourni soit avec des accoudoirs escamotables tube-mousse soit des accoudoirs réglables en hauteur. La Fig. 17 représente des accoudoirs tube-mousse. Pour monter des accoudoirs tube-mousse, laisser descendre l'accoudoir tube-mousse (1) dans son logement (2).

La Fig. 18 représente l'accoudoir réglable en hauteur.

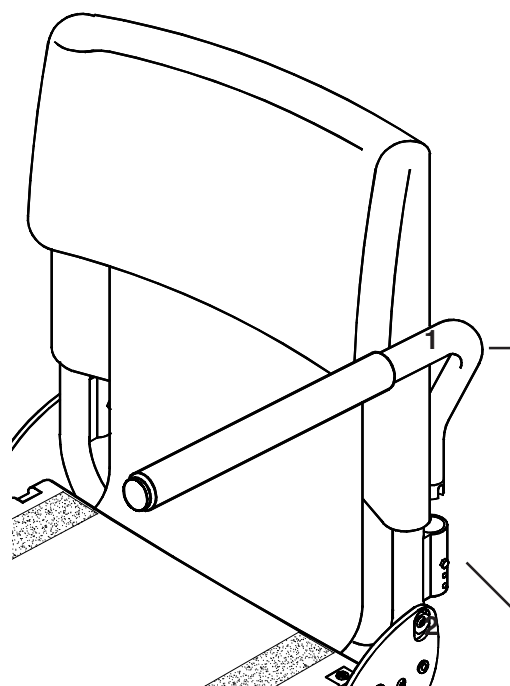


Fig. 17

Caracteristiques du fauteuil

Accoudoirs réglables en hauteur (Option)

Pour installer les accoudoirs, faire glisser le montant extérieur (1) dans le logement (2). L'accoudoir se verrouille automatiquement (Fig. 18).

Pour régler la hauteur de l'accoudoir, faire tourner le levier de déverrouillage (3) jusqu'au second cran (Fig. 18B). Faire glisser l'accoudoir (4) vers le haut ou vers le bas à la hauteur désirée et remettre le levier en position de blocage. Pousser l'accoudoir jusqu'à ce que le montant supérieur se verrouille en position.

Pour retirer l'accoudoir, faire tourner le levier de déverrouillage jusqu'au premier cran et retirer l'accoudoir (Fig. 18C). Pour remplacer l'accoudoir, faire glisser à nouveau l'accoudoir dans le logement (2) et remettre le levier en position de verrouillage (Fig. 18).

L'accoudoir peut être ajusté pour éliminer le jeu du logement et du montant à l'intérieur (Fig. 18). Pour serrer ou desserrer le montant extérieur dans le logement, commencer par desserrer les quatre boulons plats de 10 mm (5), deux de chaque côté du logement. L'accoudoir se trouvant dans le logement, serrer le logement pour atteindre l'ajustage souhaité puis serrer les quatre boulons. Pour ajuster le montant intérieur, deux vis sans tête (6) sont

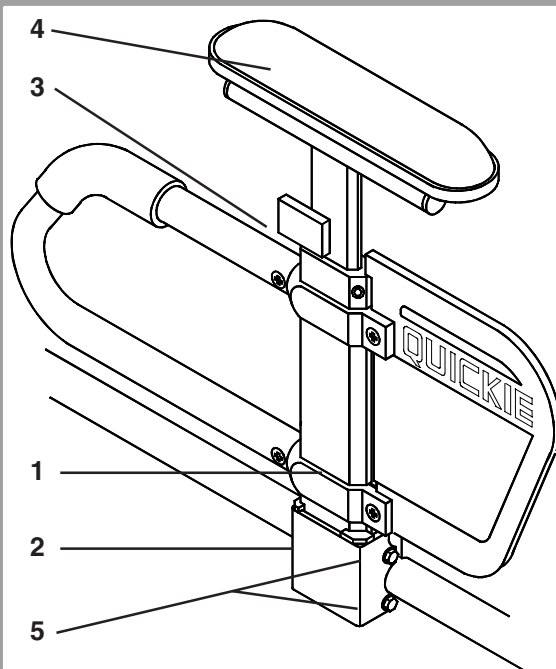


Fig. 18

Fig. 18B

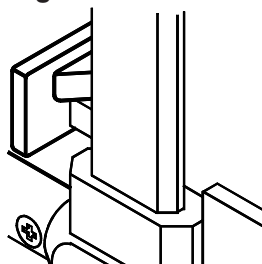


Fig. 18 C

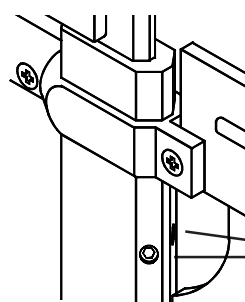
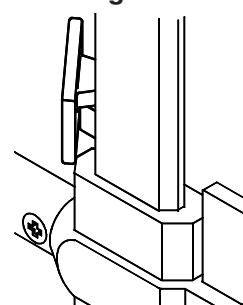


Fig. 18D

installées sur le montant extérieur (Fig. 18D). Tourner les vis sans tête dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que le serrage désiré soit atteint en utilisant une clef Allen de 3/32".

Caracteristiques du fauteuil

Roulettes anti-basculé (en option)

Pour monter les roulettes anti-basculé (Fig. 19), maintenir les goupilles de verrouillage (1) à l'intérieur et insérer le tube anti-basculé dans le logement (2). Pour retirer le tube anti-basculé, maintenir les leviers de déblocage à l'intérieur et faire glisser les tubes vers l'extérieur. Dans certains cas, il peut être sage de faire tourner les tubes à 180°, maintenir les goupilles de verrouillage à l'intérieur et faire tourner les tubes à 180°, laisser les goupilles de verrouillage s'encliqueter en position. Il est à noter que la roue arrière est représentée retirée pour plus de clarté.

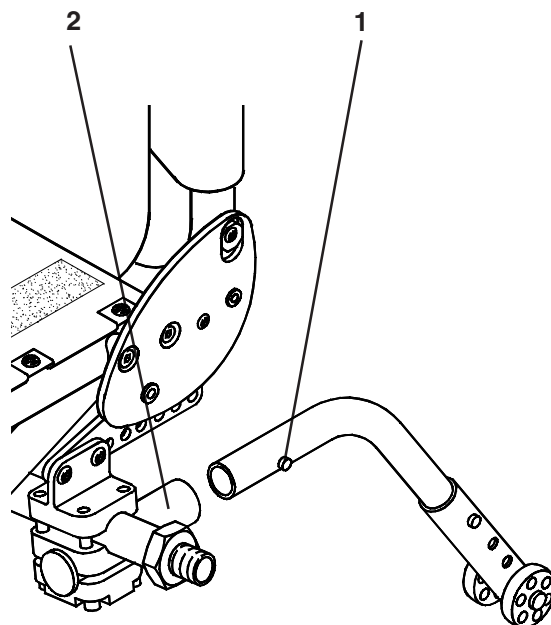


Fig. 19

Axes à déverrouillage rapide (en option)

Pour retirer les axes à déverrouillage rapide (Fig. 20) appuyer simplement sur l'axe à déverrouillage rapide (1) situé sur le moyeu de roue (2) et saisir la roue par les rayons (3) autour du moyeu, sortir l'axe de son guide (4). Pour le replacer, faire glisser l'axe dans le guide jusqu'à ce que l'axe ressorte.

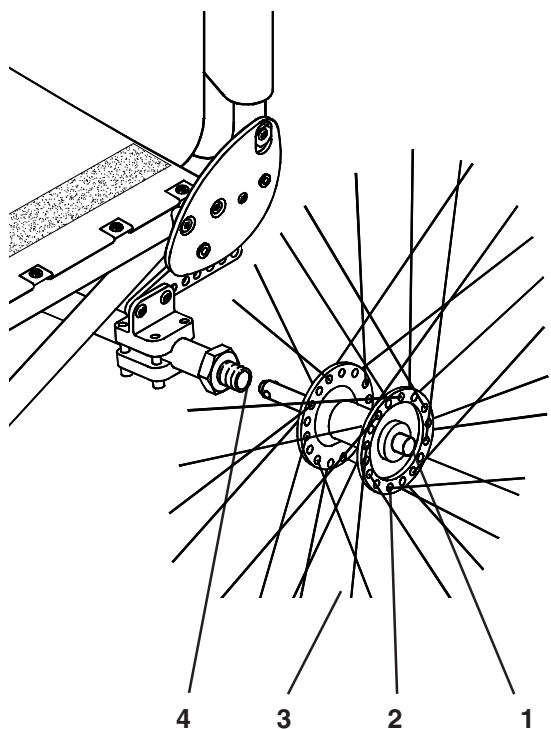


Fig. 20

⚠ Attention:

L'axe n'est pas fixé tant que l'axe à déverrouillage rapide à l'extérieur n'est pas entièrement ressorti.

Caracteristiques du fauteuil

Dossier

Le fauteuil Revolution a un dossier réglable au niveau de l'angle et de la hauteur (Fig. 21).

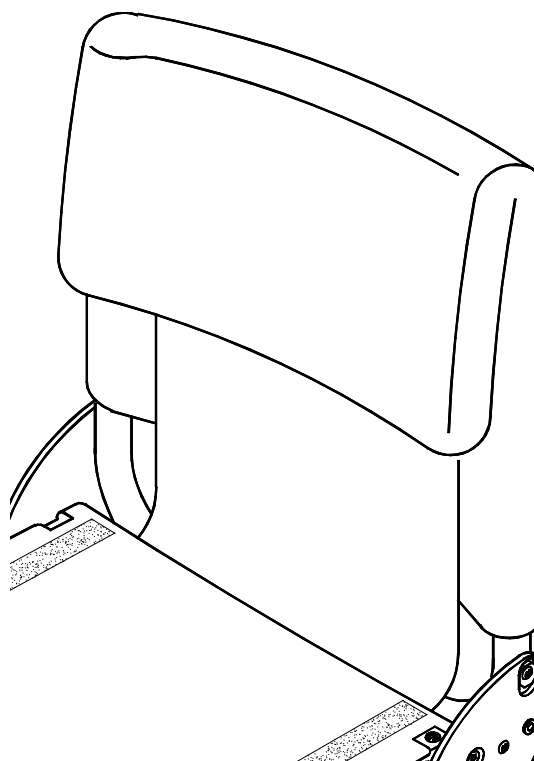


Fig. 21

Freins

Les freins ciseaux (Fig. 22) sont montés sur la version standard des fauteuils Revolution. Le frein se monte sur un système de serrage (1) et est correctement réglé avant de quitter l'usine. Pour freiner, tirer le levier (2) vers l'avant jusqu'à ce qu'il passe par dessus le centre et que le bras (3) s'enfonce dans le pneu (4).

⚠ Attention:

Les freins ciseaux ne sont pas conçus pour ralentir le fauteuil en mouvement. Les freins lorsqu'ils sont bien ajustés, empêchent les roues arrière de tourner lorsque le fauteuil est à l'arrêt.

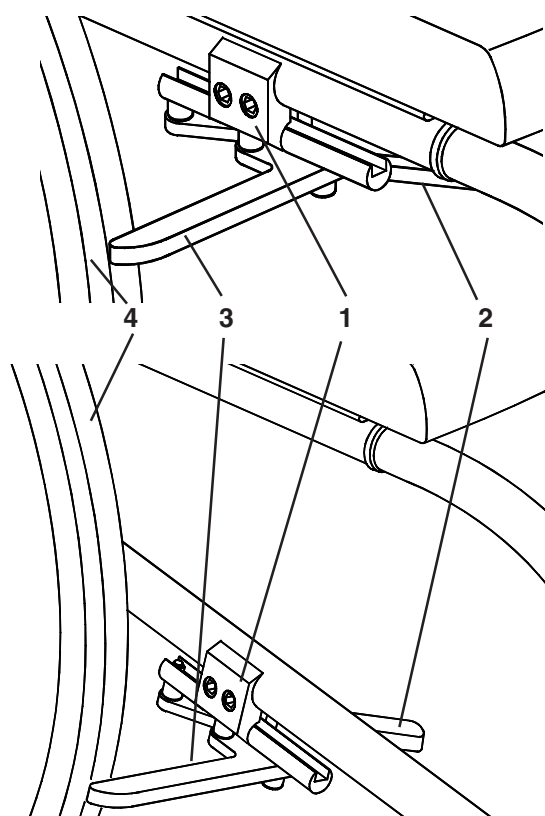


Fig. 22

Reglages du fauteuil

Réglage de l'angle du repose-pieds

Pour ajuster l'angle du repose-pieds (Fig. 23) desserrer les vis de retenue (1) comme indiqué, en utilisant une clef Allen, de 5 mm, suffisamment afin de pouvoir faire tourner le repose-pieds dans la position désirée. Serrer jusqu'à 8-10Nm.

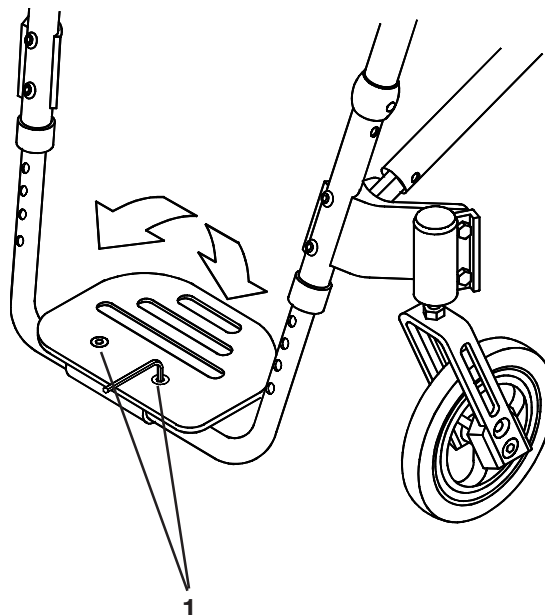


Fig. 23

Position du repose-pieds

Pour régler la position du repose-pieds (Fig. 24) retirer les deux vis (1) et les écrous (2). Tourner le repose-pieds (3) à 180° et replacer les deux vis et écrous, serrer en utilisant une clef Allen de 4 mm. Serrer jusqu'à 8-10Nm.

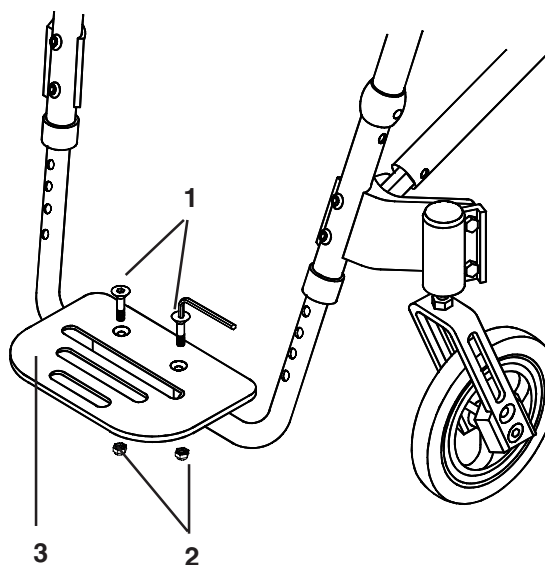


Fig. 24

Reglages du fauteuil

Hauteur du repose-pieds

Pour régler la hauteur du repose-pieds (Fig. 25) desserrer les deux vis (1) suffisamment pour laisser les tubes (2) coulisser dans ou hors du repose-pieds. (Utiliser une clef Allen de 5 mm). Retirer les deux vis (3), en utilisant une clef Allen de 4 mm et déplacer les tubes vers le haut ou vers le bas à la position requise, en prenant soin de bien aligner les trous des tubes avec les trous du cadre (4). Replacer les deux vis et serrer jusqu'à 8-10Nm.

⚠ Attention:

Les vis (3) raccordent également le cadre avant (4) et les supports de fourche (6) aux tubes du cadre inférieur (5). En desserrant les vis, s'assurer que le support de fourche est maintenu dans sa position d'origine.

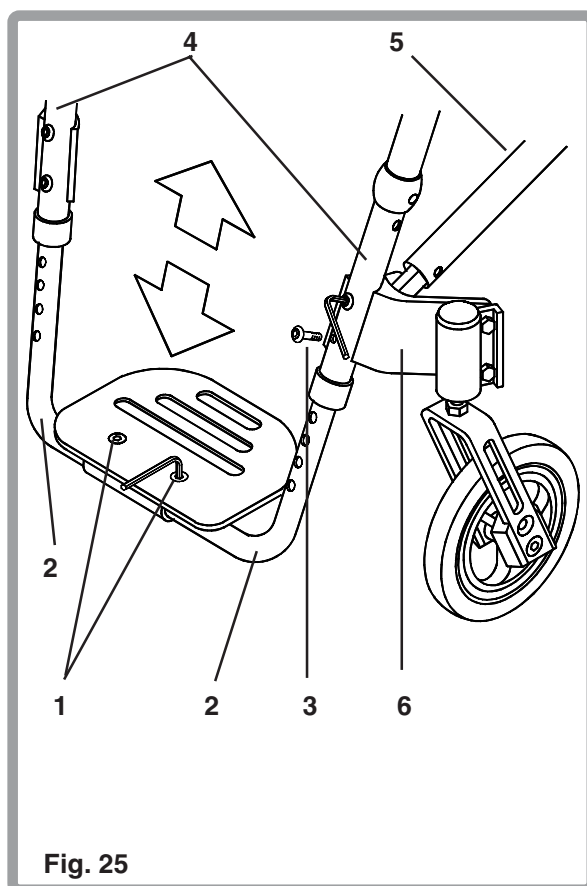


Fig. 25

Reglages du fauteuil

Réglage des freins

Pour effectuer le réglage (Fig. 26) desserrer les deux écrous de 12 mm (1) en bas du dispositif de serrage (2). Déplacer le bloc frein vers l'avant ou vers l'arrière sur le tube du cadre (3) pour que le levier (4) s'enfonce dans le pneu (5) d'environ 4 mm en position verrouillée. Resserrer les écrous.

⚠ Attention:

Toujours ajuster les freins après avoir modifié la position des guides de l'axe de roue arrière, de façon à ce que le levier s'enfonce dans le pneu d'environ 4 mm en position verrouillée.

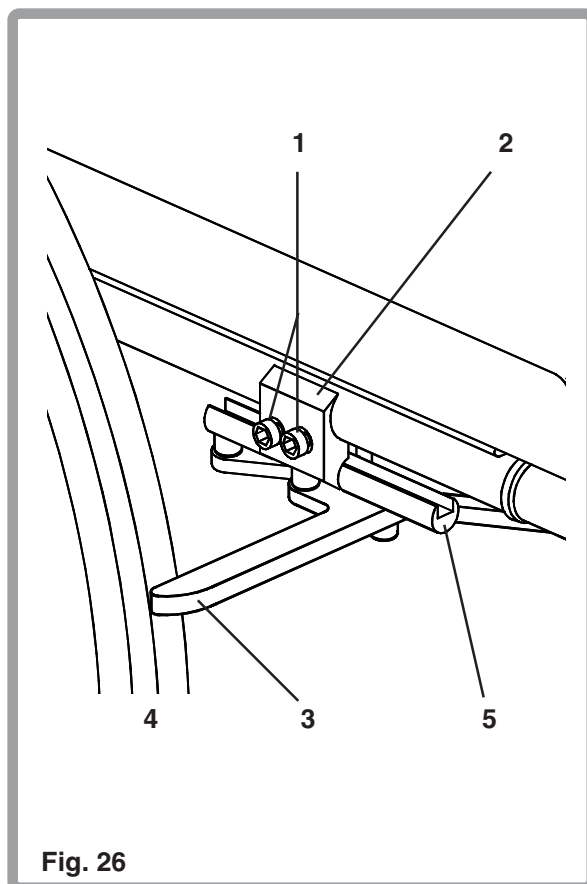



Fig. 26

Reglages du fauteuil

Inclinaison du dossier


L'angle du dossier (Fig. 27) est ajusté en desserrant les boulons excentriques de la plaque (1) avec une clef de 4 mm et le boulon à pivot (2) avec une clef Allen de 4 mm, suffisamment pour faire tourner l'ensemble des excentriques.

Lorsque la position souhaitée est atteinte, serrer jusqu'à 8-10Nm.

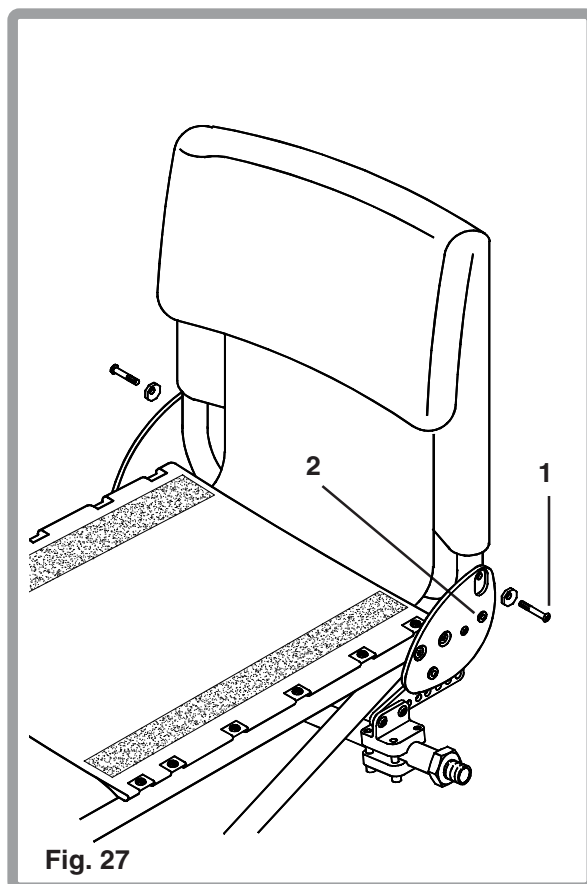

Hauteur du dossier

Retirer la toile et les vis de retenue et rondelles (Fig. 28) des deux côtés du tube du dossier (2), en utilisant une clef Allen de 5 mm (1). Déplacer les tubes internes (3) à la position désirée, bien aligner les trous des deux tubes et remettre les vis de retenue et les rondelles. Serrer jusqu'à 8-10Nm.

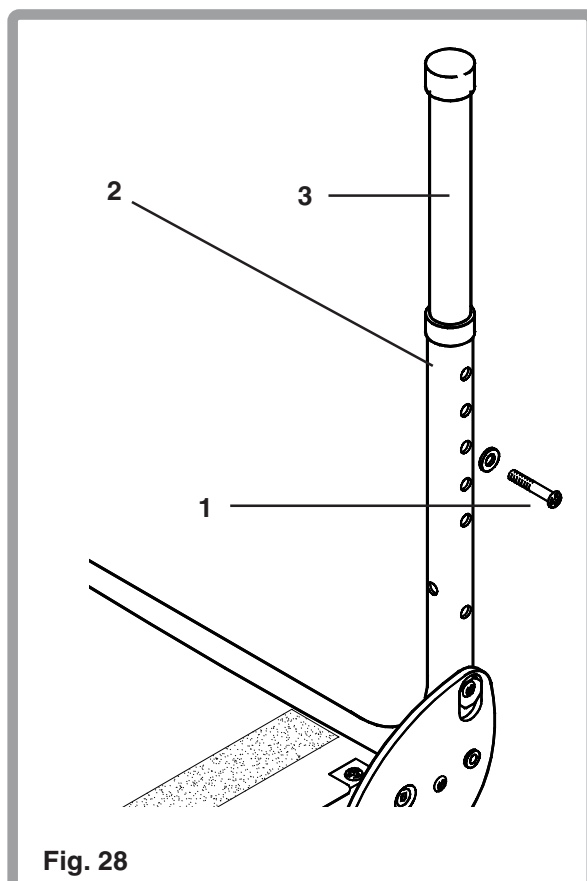

Reglages du fauteuil

Hauteur de l'accoudoir (option)

La hauteur des accoudoirs escamotables peut être modifiée (Fig. 29). Retirer l'accoudoir (1) du logement (2). Retirer la vis de réglage de la hauteur (3) en utilisant une clef plate de 10 mm et la repositionner dans le trou taraudé requis (4) puis resserrer. Serrer jusqu'à 8-10Nm
Replacer l'accoudoir dans le logement.

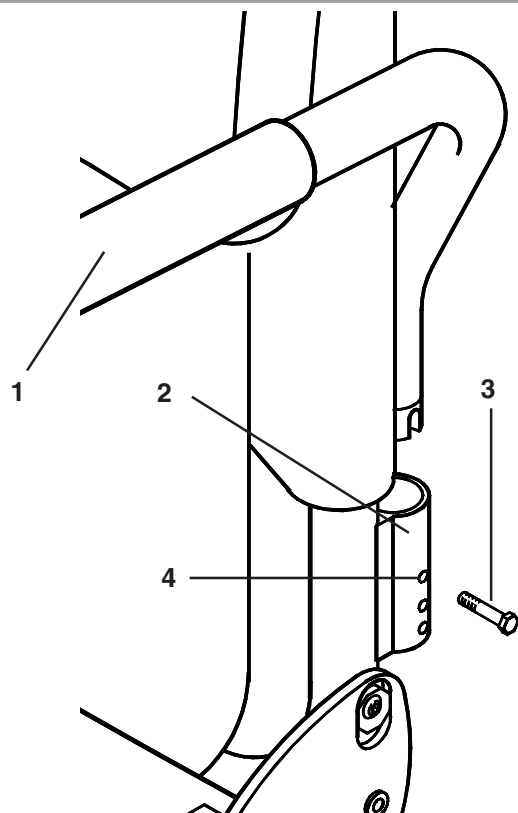


Fig. 29

Tension de la toile d'assise

La toile d'assise (Fig. 30) peut être retendue en utilisant des panneaux Velcro® sous le siège (2). Retirer les vis cruciformes n° 2 (1) retenant le côté gauche de l'assise avec un tournevis approprié, réajuster le Velcro® pour tendre correctement l'assise. Replacer les vis et serrer jusqu'à 8-10Nm.

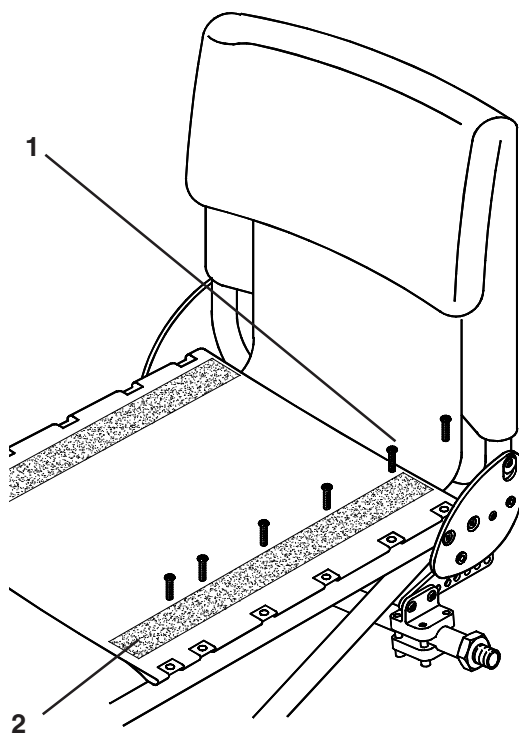


Fig. 30

Reglages du fauteuil

Roulettes anti-bascule (en option)

La hauteur des roulettes anti-bascule (Fig. 31) peut être modifiée en appuyant sur les goupilles (1) du tube anti-bascule (2) et en faisant coulisser le manchon de réglage (3) du tube anti-bascule à la position souhaitée. La goupille va s'encliquer dans le trou souhaité (4) du manchon de réglage.

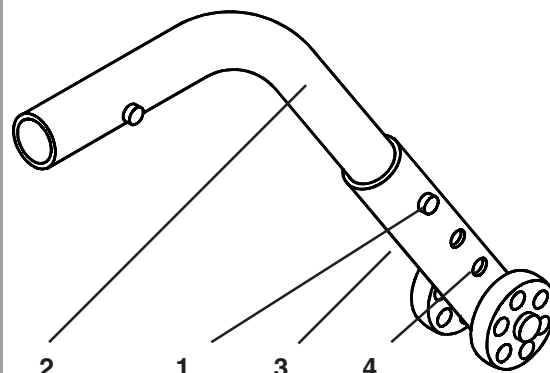


Fig. 31

Positions de l'axe de roue arrière Centre de gravité

Le centre de gravité (Fig. 32) est ajusté en déplaçant l'ensemble de l'axe (1) et la barre de carrossage (2) sur la plaque d'axe indexée (3). Pour déplacer l'ensemble d'axe, défaire et retirer les boulons de retenue (4) et les écrous, en utilisant une clef Allen de 4 mm et une clef plate de 10 mm, placer l'ensemble dans les trous souhaités (5), remonter les boulons et écrous de retenue et serrer jusqu'à 8-10Nm.

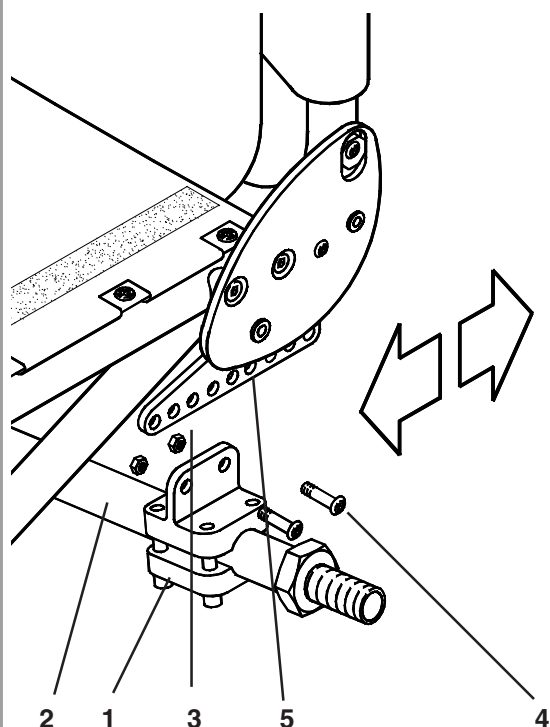


Fig. 32

Reglages du fauteuil

Positions de l'axe de roue arrière Hauteur du siège

La hauteur du siège (Fig. 33) est ajustée en retirant le dispositif de serrage de l'axe (1) et la barre de carrossage (2).

Retirer les deux vis de retenue (3) et les écrous (4) avec une clef Allen de 4 mm et une clef plate de 10 mm et en ajoutant un écarteur d'axe (5) en utilisant les vis et écrous (6) prévus dans le kit. Les écarteurs sont disponibles dans les dimensions 19 mm et 38 mm.

Note: Les deux écarteurs d'axe doivent être placés dans les trous correspondants des deux côtés du cadre pour assurer un centre de gravité correct du fauteuil.

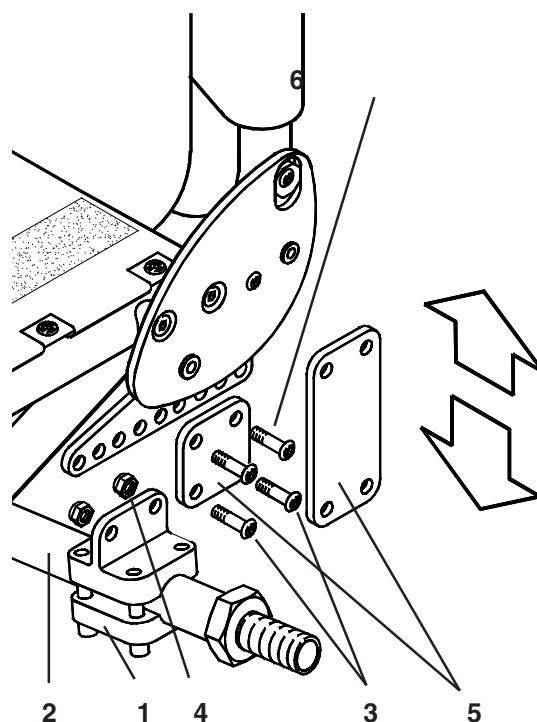


Fig. 33

Positions de l'axe de roue arrière Largeur de l'empattement

La largeur de l'empattement (Fig. 34) est ajustée en desserrant l'écrou du guide de l'axe de 28 mm (1) et en vissant le guide de l'axe (2) vers l'intérieur ou vers l'extérieur. L'écrou doit être resserré.

Serrer jusqu'à 81Nm

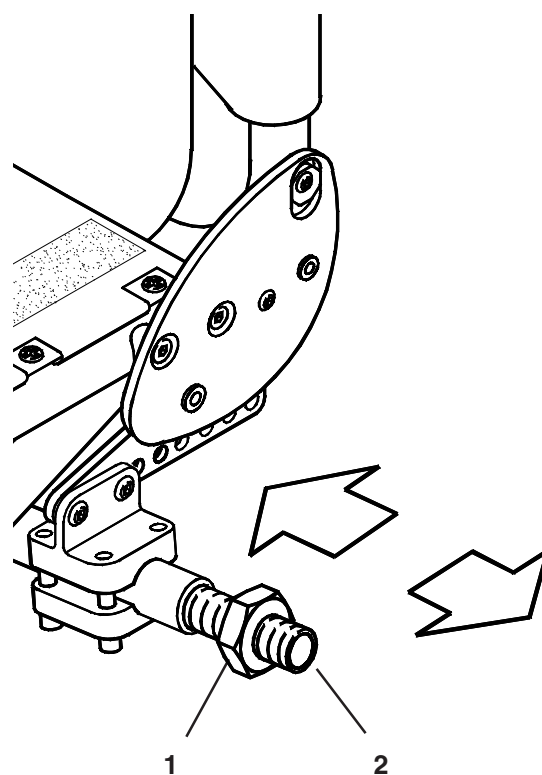


Fig. 34

Reglages du fauteuil

Carrossage de l'axe de roue arrière

Le carrossage de la roue (Fig. 35) est déterminé par votre choix de barre de carrossage et de dispositifs de serrage d'axe. Les tubes et les dispositifs de serrage sont disponibles avec des réglages de 0°, 4°, 8° et 12° chez les distributeurs Sunrise Medical. Pour modifier le carrossage, retirer la barre de carrossage et les dispositifs de serrage en retirant les deux vis de retenue et les écrous du dispositif de serrage en suivant la procédure de réglage de la hauteur du siège et en montant la barre de carrossage souhaitée ainsi que le dispositif de serrage d'axe.

⚠ Attention

Toujours s'assurer que le tube de carrossage et l'angle des dispositifs de serrage correspondent.

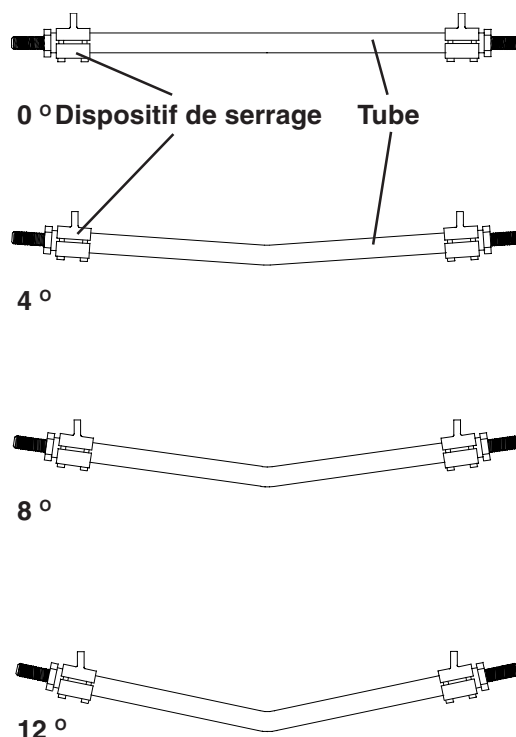


Fig. 35

Reglages du fauteuil

Pincement ou ouverture de l'axe de roue arrière

La position correcte de la roue est réglée en usine. Si vous souhaitez modifier l'angle du siège, il est nécessaire de toujours vérifier le pincement / l'ouverture. (Fig. 36 B). Le réglage (Fig. 36) peut être effectué en retirant la plaque latérale (1) et en desserrant la vis de retenue de la rondelle d'excentrique (2). Ceci doit dégager le logement (3), tourner la rondelle dans la mesure nécessaire. Une fois le réglage désiré obtenu, resserrer la vis (2) et replacer la plaque latérale en resserrant toutes les vis.

La clef Allen est de 4 mm.
Serrer jusqu'à 8-10Nm.

⚠ Attention

Le pincement/l'ouverture des deux roues doit être équivalent.
Le maximum est de 15 mm.

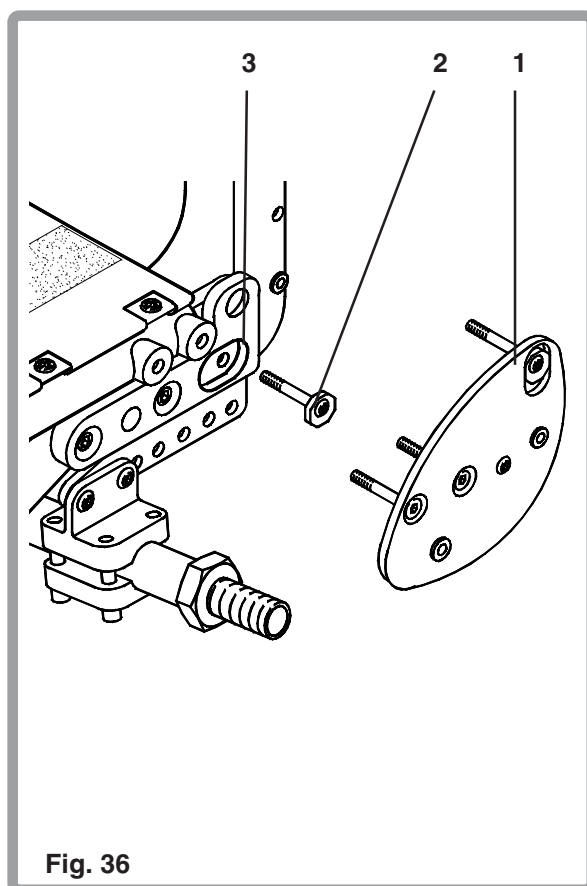


Fig. 36

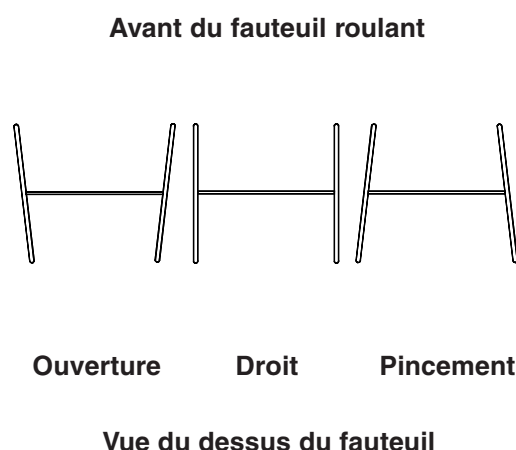


Fig. 36B

Reglages du fauteuil

Réglage des roues

Pour supprimer le jeu de la fourche (Fig. 37), retirer le bouchon (1) en le faisant sauter. Serrer l'écrou (2) avec une clef de 19 mm jusqu'à éliminer tout le jeu, tout en laissant la fourche tourner librement. Remettre le bouchon en place.

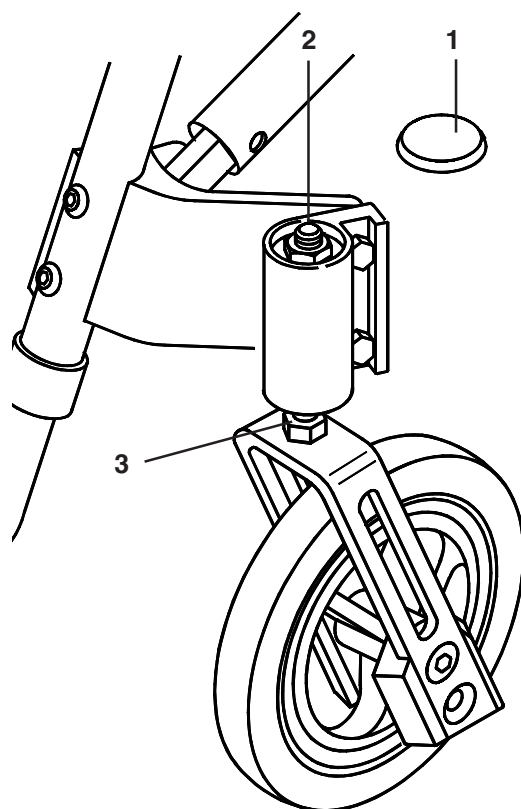


Fig. 37

Réglage de la hauteur d'assise (à l'avant)

Afin de régler la hauteur d'assise à l'avant du fauteuil, utiliser le trou (1) de la fourche (2) cf (Fig. 38). Oter les 2 vis (3) avec une clef Allen de 4 mm qui se trouvent dans les trous du bas de la fourche. Ajuster la roue à votre convenance et revisser (27 Nm).

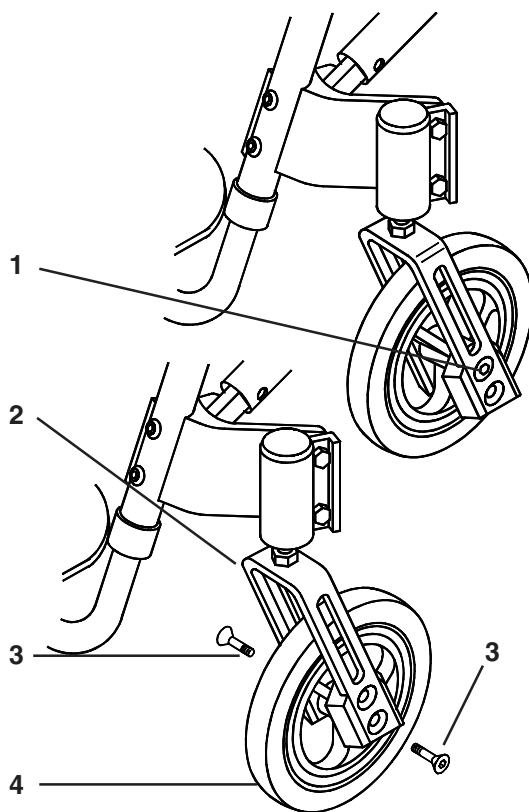


Fig. 38

Reglages du fauteuil

Réglage de l'angle des roues

Pour une performance optimale, le support de fourche (Fig. 39) doit toujours être à 90° par rapport au sol (perpendiculaire au sol). Ce réglage est fait par un mécanisme à boulon excentrique (déporté) (1). Pour modifier l'angle, placer le fauteuil sur une surface plane (comme une table.)


Retirer les écrous (2) avec une clef plate de 10 mm (2) depuis l'arrière du support de fourche (3).

Vous noterez que le support de fourche est fendu sur le côté pour réglage. Placer un objet à angle droit (4) contre la surface plane et la surface avant du support de fourche (5). Aligner l'axe de rotation de la fourche perpendiculairement à la surface plane.

Tourner les boulons séparément jusqu'à ce qu'ils soient en position. Lorsque l'alignement est satisfaisant, serrer de nouveau les deux boulons de retenue.

Serrer jusqu'à 8-10Nm.

Répéter le processus pour l'autre roue.

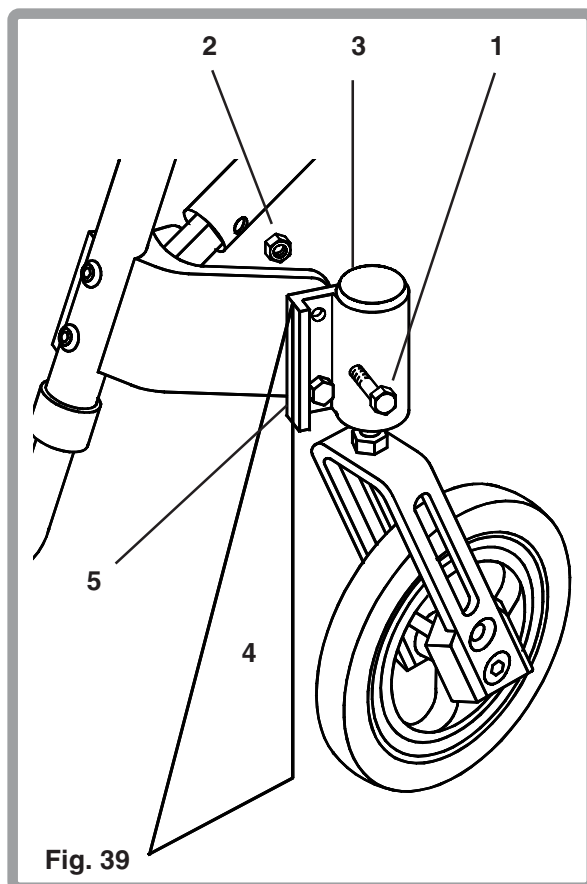

Reglages du fauteuil

Réversibilité de la roulette

Le support de fourche est généralement monté dans une position face vers l'avant (Fig. 40). Mais si un dégagement supplémentaire pour le repose-pieds est nécessaire, le support de fourche peut être inversé comme sur la Fig. 40.

Ceci permettra de positionner le support de fourche vers l'arrière pour laisser plus de dégagement. Après inversion, suivre la procédure de réglage de la hauteur du siège pour régler l'angle de roue.

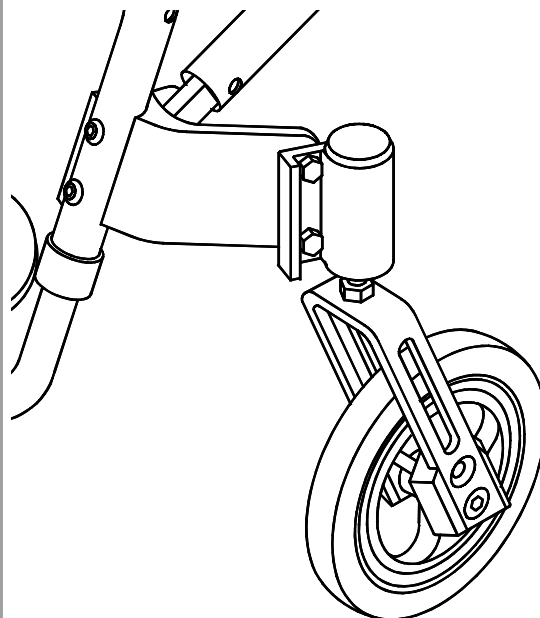


Fig. 40

Inversion des roues

Pour inverser la plaque des supports de fourche comme sur la Fig. 41, la plaque gauche doit être montée sur le côté droit du cadre, et la plaque droite sur le côté gauche du cadre.

Se référer à la figure 39 page 34. Les deux boulons de retenue (1) et les écrous (2) doivent être retirés des deux ensembles de roues (3) et les deux ensembles de roues retirés et leurs positions inversées sur le fauteuil. Les boulons doivent être replacés et les étapes de réglage de l'angle de roue suivies (Fig. 39, page 34).

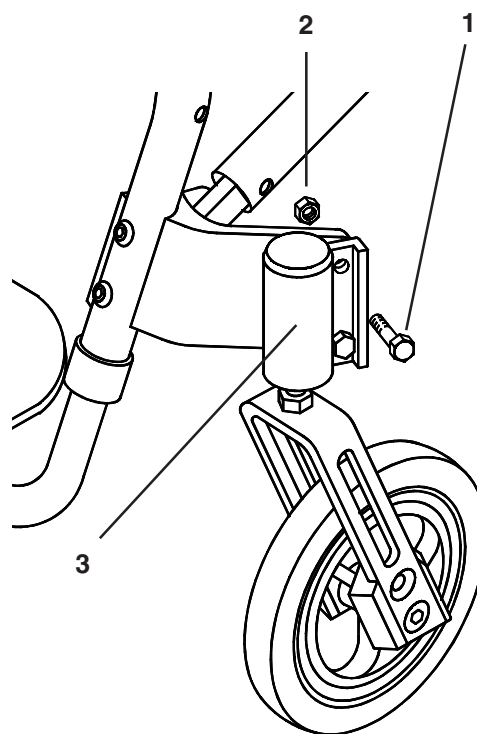


Fig. 41

Reglages du fauteuil

Montage à l'intérieur

Les ensembles de roues peuvent également être montés à l'intérieur du cadre (Fig. 42). Pour le montage, suivre la procédure de réglage de la hauteur du siège pour régler l'angle des fourches.

⚠ Attention

Nous vous indiquons que vous ne pouvez monter les fourches à l'intérieur que si elles sont de type à déverrouillage rapide. (Si d'autres types de fourches sont utilisés, elles peuvent gêner le pliage du fauteuil et endommager la peinture du cadre).

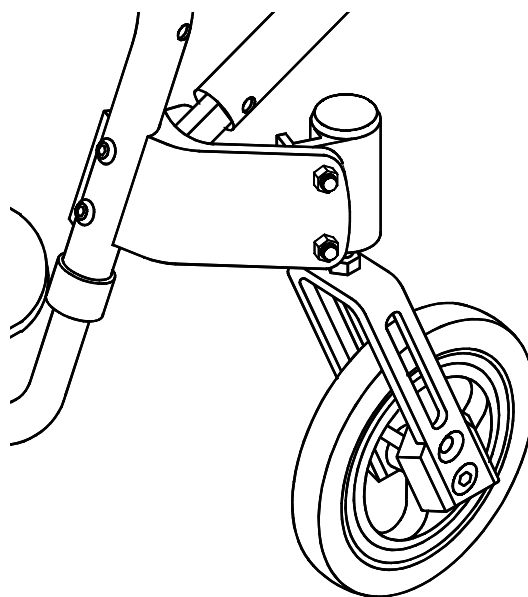


Fig. 42

Transport

Transport par véhicules

Les utilisateurs ne doivent en aucun cas être assis dans leur fauteuil roulant lorsqu'ils se déplacent par un moyen de transport quelconque.

Seuls les sièges de voiture et les ceintures de sécurité fixes offriront une protection suffisante en cas de danger. Lorsque le véhicule est en marche, veillez à ce que le fauteuil roulant vide soit bien attaché.

Programme de maintenance

Tous les fauteuils Revolution quittent l'usine après avoir été vérifiés et réglés pour utilisation immédiate. Une utilisation continue nécessite une maintenance régulière et des réglages, en particulier si les réglages d'origine sont modifiés. Le réglage initial effectué par votre fournisseur de fauteuil doit être adapté à votre corps et à vos préférences personnelles.

Le fauteuil doit être contrôlé après les 4 à 6 premières semaines d'utilisation car le mécanisme de pliage va 'se faire' et peut nécessiter un réglage pour éviter tout grincement inutile.

Le tableau suivant donne une indication sur la périodicité des contrôles de maintenance qui aideront à prolonger la durée de vie et l'efficacité de votre fauteuil roulant.

Revolution LISTE DE CONTROLE				
	HEBDOMADAIRE	TRIMESTRIEL	SEMESTRIEL	ANNUEL
GENERAL				
1. Pression des pneumatiques 450 kilopascals / 4.5 bar (65 ps) roues arrière 250 kilopascals / 2,5 bar (36 psi) roulettes.	●			
2. Freins Contrôler les éléments de fixation desserr		●		
3. Roues avant Contrôler que le train avant et la roue tournent librement.		●		
4. Roulement du fauteuil. Contrôler que le fauteuil roule droit sans déport excessif.		●		
5. Pliage du fauteuil Vérifier que le fauteuil s'ouvre facilement. Contrôler les éléments de fixation desserrés.		●		
6. Accoudoirs (escamotables, réglables en hauteur) Contrôler que tous les éléments de fixation soient sûrs et que tous les mécanismes fonctionnent bien.		●		
7. Joints et pliage du fauteuil Contrôler les joints desserrés et / ou les joints bruyants.		●		
8. Toile de siège ou toile de dossier Contrôler l'usure ou l'affaissement de la toile			●	
9. Une inspection complète avec contrôle de sécurité et entretien doit être effectué par un fournisseur agréé de Sunrise Medical.				●

Directives de nettoyage, accessoires et outils

Directives de nettoyage

En plus des contrôles de maintenance de la page précédente, un nettoyage général du châssis et de la toile doit être entrepris. Pour conserver son aspect à la toile, il est nécessaire de la nettoyer régulièrement. Une salissure légère peut être éliminée d'un coup d'éponge avec un détergent doux et de l'eau chaude en frottant dans le sens de la texture. Rincer à l'eau propre avant de laisser sécher.

▲ NE PAS METTRE LA TOILE DANS UN SECHE-LINGE.

Ne pas utiliser d'agent blanchissant ni de solvant.

Si la saleté est incrustée, la surface doit être nettoyée avec une brosse souple.

Le châssis doit être nettoyé régulièrement avec un produit non abrasif avant d'être poli avec une cire automobile non abrasive.

Outils

Pour entretenir votre fauteuil, vous aurez besoin des outils suivants :

Une clef réglable

Des clefs Allen 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mm

Une clef Allen de 3/32"

Une clef de rayon

Des clefs de 10, 13, 17 et 19 mm

Un tournevis cruciforme n° 2

Accessoires

Sac pour accoudoir

Rouleau basket

Caddie

Kit outils

Rouleau basket (transparent)

Flasques (noir)

Ecarteur de plaque d'axe

Version

+ 19 mm

+ 38 mm

Sac à dos et de siège

Adulte

Enfant

Ceintures de positionnement :

longue, à Velcro® 170 cm

courte, à Velcro® 145 cm

longue, à boucle 163 cm

courte, à boucle 137 cm

Peintures retouche

Tablette

Petite 33 - 36 cm

Moyenne 38 - 41 cm

Tablette amovible

Systèmes d'assise et de positionnement JAY disponibles. Contacter le service clients pour prescriptions individuelles.

Donnees techniques

Revolution

Longueur hors tout avec appui-jambes	813mm min. 892mm max.
Largeur hors-tout	677mm
Longueur, fauteuil plié	690mm
Largeur, fauteuil plié	558mm
Hauteur, fauteuil plié	285mm
Poids total	12,5kg
Poids de la partie la plus lourde	9,5kg
Stabilité statique en descente	Less than 1°
Stabilité statique en montée	Less than 1°
Stabilité statique sur les côtés	Less than 1°
Angle plan du siège	16.5°
Profondeur effective du siège	480mm
Largeur effective du siège	416mm
Hauteur d'assise à l'avant	443mm
Angle dossier	16,5° min. 25,5° max.
Hauteur dossier	350mm min. 425mm max.
Distance du repose-pieds au siège	370mm min. 460mm max.
Angle des jambes par rapport à la surface d'assise	90°
Distance accoudoir jusqu'au siège	Not applicable
Emplacement avant de la structure de l'accoudoir	Not applicable
Diamètre de la main-courante	532mm
Emplacement horizontal de l'axe	50mm min. 120mm max.
Rayon de rotation minimum	580mm

Sunrise Medical

Votre nouveau fauteuil Revolution est fabriqué dans les West Midlands par Sunrise Medical. Avec plus de 30 ans d'expérience, nous sommes l'un des plus anciens fabricants de matériel de mobilité établi au RU. Tous nos fauteuils roulants, fauteuils électriques Scootas et monte-escaliers sont soumis à des tests rigoureux pour respecter nos prescriptions de confort, de sécurité et de durabilité. Notre succès est basé sur nos fortes traditions de qualité, notre bon rapport qualité prix et l'attention que nous portons à nos clients.

Nous sommes fiers non seulement de concevoir et de fabriquer les produits les plus innovateurs mais également d'offrir un excellent niveau de service à nos clients pendant et après la vente.



En plus de votre nouveau fauteuil Revolution Sunrise fabrique également des concentrateurs d'oxygène, des nébuliseurs et des lève-personnes. Nous avons une importante gamme d'aides à la vie de tous les jours dont le dispositif de sortie de bain Merlin, les accessoires pour le lit et les cannes.

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires sur notre gamme complète de produits, n'hésitez pas à contacter votre prestataire de service au:

SUNRISE MEDICAL
Z.I. ROUTE DE MESLAY
37210 PARÇAY-MESLAY
FRANCE
02 47 88 58 36







Sunrise Medical Limited

High Street, Wollaston, West Midlands DY8 4PS England

Tel 01384 44 66 88 Fax 01384 44 66 99

www.sunrisemedical.co.uk



INVESTOR IN PEOPLE

