



ADAPTÉ A MA VIE
JIVE M²
SEDEO ERGO

ADAPTE A MA VIE

La révolution est en marche, découvrez la dernière génération de fauteuil roulant électrique!



JIVE[®] M²

SEDEO ERGO

Le Quickie Jive M² Sedeo Ergo redéfinit la technologie du fauteuil roulant électrique, intérieur et extérieur. Une performance en extérieur inégalée combinée à une maniabilité sans précédent en intérieur. Le Jive M² Sedeo Ergo rend non seulement possible le meilleur des deux mondes – mais offre également un système d'assise révolutionnaire pour répondre à chaque besoin.

► **DOSSIER INCLINABLE AVEC MECANISME DE COMPENSATION SINUSOIDALE:**

Avec variation de la vitesse de compensation sur 180 mm, pour un anti-cisaillement parfait

► **POSITION ALLONGEE ERGONOMIQUE:**

Avec son dossier premium inclinable à 175°

► **MULTIPLES POSITIONS D'ASSISE:**

6 positions d'assise mémorisées, personnalisables et accessibles en un seul clic

► **LOOK BICOLORE MODERNE:**

6 touches de couleurs pour affiner son design élégant

► **ACCES SIMPLIFIE, TRANSFERTS FACILITES:**

Avec coussinets latéraux escamotables et amovibles

► **CONTACT PERMANENT AVEC VOTRE REPOSE-PIEDS:**

Grâce au repose-jambes central électrique inclinable, ajustable en angle, en longueur et programmable

► **BASE MOTRICE PREMIUM A ROUES CENTRALES:**

Technologie de pointe avec la nouvelle génération SpiderTrac™



CONFORT DANS TOUTES LES POSITIONS

Le Jive M² Sedeo Ergo a été conçu pour vous aller comme un gant. De la position assise à la position allongée, il s'adapte à la forme de votre corps pour vous garantir un positionnement optimal et sans effort, comme aucun autre fauteuil roulant électrique de sa catégorie.





// DOSSIER A COMPENSATION SINUSOÏDALE

175° d'inclinaison de dossier avec variation de la vitesse de compensation sur 180 mm. Ce système unique et breveté supprime tout effet de cisaillement, maintient le positionnement de la tête et du tronc ... sur toute la phase d'inclinaison.

// CONTACT PERMANENT AVEC VOTRE REPOSE-PIEDS

Avec le repose-jambes central électrique, vos pieds ne perdent jamais le contact avec les palettes. Vous conservez toujours une position idéale, vous évitant de glisser de votre fauteuil. Grâce à deux vérins indépendants – l'un pour l'inclinaison du repose-jambes, l'autre pour l'extension – vous obtenez une compensation optimale. La coordination des deux vérins est programmable procurant ainsi une inclinaison anatomique idéale de vos jambes.



// SYSTEME UNIQUE DE REPOSITIONNEMENT BIOMETRIQUE

L'assise Sedeo Ergo offre le meilleur positionnement du marché grâce à sa fonction de repositionnement biométrique brevetée. De la position couchée à la position assise, le Jive M² Sedeo Ergo passe par une phase d'inclinaison intermédiaire pour maintenir votre

corps au fond de l'assise et ainsi prévenir de tout risque de glissement (aspect très bénéfique pour les personnes atteintes d'une dégénérescence musculaire ou de paralysie).



CONTROLE A PORTEE DE MAIN

Avec la fonction d'assignation de boutons, votre Jive M² Sedeo Ergo mémorise jusqu'à 6 positions d'assise personnalisées à vos besoins. Une simple pression sur le contacteur de mémorisation et vous atteignez la position souhaitée.





// ASSISE

La position "standard" de conduite peut être atteinte à partir de n'importe quelle autre position d'assise mémorisée en tirant le joystick vers l'arrière.

// PERSONNALISEZ VOS POSITIONS!

Chaque position mémorisée se personnalise par simple pression du contacteur de mémorisation tout en tirant, pendant 3 secondes, le joystick en arrière. Un bip vous confirme l'enregistrement de votre nouvelle position. C'est aussi simple que ça!

POSITION FAVORITES MEMORISEES

// POSITION LIFT

Avoir tout son environnement dans son champ de vision. Grâce à la dernière génération de base motrice vous roulez jusqu'à 4 km/h tout en étant lifté à 30 cm.

// JAMBES SURELEVÉES

Facilite le retour sanguin au cœur.

// COUCHE

Votre corps est presque complètement à l'horizontal.

// DECHARGE DES POINTS DE PRESSION

Inclinaison de dossier à compensation sinusoïdale et bascule d'assise jusqu'à 50°, pour une décharge totale des points de pression.



// GARDEZ LE CONTROLE

Personnalisez votre Jive M2 Sedo Ergo avec la large gamme de commandes spéciales Switch-It (une marque de Sunrise Medical). Différents boîtiers pour contrôler vos positions d'assise en un clic. Une nouvelle commande occipitale proportionnelle et Sensitive «Dual Pro» (1) ou le joystick compact «VersaGuide» (2) pour une conduite simple et intuitive.



DESIGN SUBTIL ET MODERNE

Système d'assise multi réglable ingénieux sous tous les angles. Avec sa sellerie épousant la forme naturelle de votre corps, ses lignes épurées et son design minimaliste, le Jive M² Sedeo Ergo vous apporte le confort absolu et le style qui ne cessera d'attirer l'attention.



// TRANSFERT LATERAL SIMPLE

Le coussin d'assise est constitué de trois éléments: deux coussins latéraux brevetés escamotables et amovibles pour optimiser le transfert latéral et la partie centrale pouvant être substituée par un coussin JAY, pour répondre à des besoins spécifiques de positionnement.





// CHOISISSEZ VOTRE COULEUR PREFEREE

Créez votre propre look avec une sélection de 6 coloris.



// REGLAGES D'ASSISE A L'INFINI POUR NE FAIRE QU'UN AVEC VOTRE CORPS

Appui-tête premium réglable en hauteur et amovible via le mécanisme de réglage rapide intégré. **1**

Toutes les largeurs **2** et profondeurs **3** du Sedeo Ergo sont réglables en continu avec un seul outil (clé Allen de 5 mm). La largeur d'assise et de dossier **4** s'ajustent indépendamment l'une de l'autre. Equipé d'accoudoirs réglables en hauteur et en angle en un tour de main **5**.



PREMIUM TECHNOLOGIE SPIDERTRAC 2.0

Souple, sûre et confortable pour arpenter tout type de terrain, le Jive M² Sedeo Ergo n'a jamais été aussi intuitif à conduire. Il devient le fauteuil de choix pour ceux qui rencontraient des difficultés à conduire un fauteuil électrique ou pour ceux qui nécessitent une commande spéciale.




// PERFORMANCE EXTERIEURE SUPERIEURE

Avec le SpiderTrac suspension 2.0, vous bénéficiez d'une conduite souple quel que soit le terrain tout en conservant une traction optimale, une excellente stabilité et un minimum de tangage – même en descendant des trottoirs de 10 cm!




// EXCELLENTE MANIABILITE INTERIEURE

Grâce au centre de rotation localisé en dessous de vous, le Jive M² Sedeo Ergo tourne sur son propre axe, octroyant ainsi un rayon de giration ultra-court pour une excellente manoeuvrabilité.

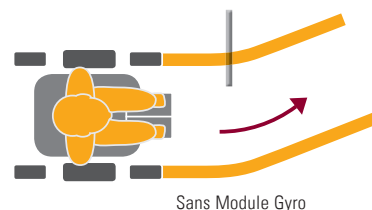

Sans Module Gyro

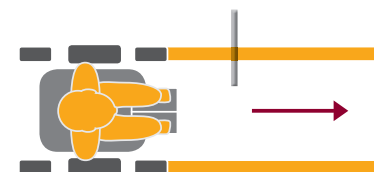

Avec Module Gyro

// MODULE GYRO CONTROLEUR DE TRAJECTOIRE

Avec l'option de contrôle de trajectoire gyroscope, ne vous préoccupez plus de la tenue de route de votre fauteuil, même sur des terrains irréguliers. Tous vos écarts de conduite sont automatiquement détectés et corrigés. Votre sécurité est ainsi assurée sur les surfaces difficiles et la conduite vous demande moins d'effort – particulièrement appréciable avec une commande spéciale.

// CRASH TESTÉ POUR PLUS DE SÉCURITÉ LORS DU TRANSPORT

Le Quickie JIVE M² Sedeo Ergo a été crash testé avec succès et répond aux exigences de performance ISO 7176-19. En conséquence, le transport des personnes assises dans leur fauteuil roulant électrique dans un véhicule est autorisé.



DONNÉES TECHNIQUES

Jive M² Sedeo Ergo // Fauteuil roulant électrique

Poids max. de l'utilisateur:	160 kg	Largeur minim. pour 1/2 tour:	100 cm
Largeur du siège:	40 – 56 cm (en continu)	Stabilité dynamique max.:	10°
Profondeur du siège:	40 – 56 cm (en continu)	Capacité de franchissement:	10 cm
Hauteur du siège:	44.5 – 48 cm	Dimensions roues:	14" roues arrière, 6" roues avant
Inclinaison de l'assise:	0° à 50°; -5° à 45° (en option)	Touches de couleur:	6 coloris: rouge, bleu, vert, orange, blanc, noir
Hauteur du dossier:	51 cm – 61 cm	Autonomie max. (ISO 7176-4):	max. 35 km (varie selon profil de la route, poids de l'utilisateur & options électriques)
Angle du dossier:	85° à 175° (électrique en compensation sinusoïdale)	Poids total:	à partir de 160 kg (incluant batteries)
Largeur hors-tout:	62 cm	Crash testé:	Oui (ISO 7176-19)
Longueur hors-tout:	107 cm	Position tarifaire:	502 000
Hauteur hors-tout:	110 cm		
Fonctions mémoire d'assise:	Pos. assise, couchée, relax, + 3 pos. librement programmables		
Vitesse:	10 km/h		
Batteries:	70 Ah		
Commande:	R-Net, éclairage & clignotants (en option)		

Pour de plus amples renseignements, merci de consulter la documentation sur notre page Internet. Le service client Sunrise Medical se fera également un plaisir de répondre à vos questions.

Sous réserve de modifications techniques, d'adaptations et de fautes d'impression.



Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
Fax: 031 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch